

6. Accesorios


Nombre	Cantidad
Cable de alimentación	1 unidad
Exfoliador de piel	1 unidad
Mango de RF	1 unidad
Sonda ultrasónica	1 unidad
Martillo frío	1 unidad
Sonda de hidrofacial	1 unidad
Cabezal de sonda de hidrofacial	7 unidades
Pistola de spray	1 unidad
Mascarilla	1 unidad

Máquina de hidrofacial H₂O₂ Manual de usuario



Estimado cliente, ¡gracias por comprar nuestro producto!
Para el mejor rendimiento y seguridad, lea este manual de instrucciones
antes de operar el equipo.
Conserve este manual para futuras referencias.

1. Introducción breve

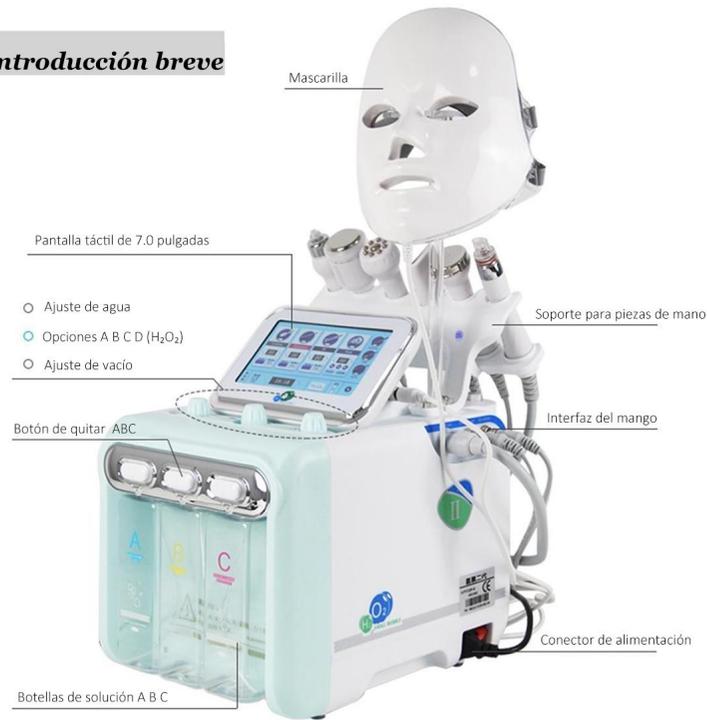

Mango facial
aguamarina



Mango de ultrasonido



Exfoliador de piel



Mango de RF



Pistola de spray



Martillo frío



Mascarilla

4.7.2 Nota


- 1) No mire directamente la fuente de luz LED durante mucho tiempo.
- 2) Si utiliza una mascarilla desechable o cosméticos junto con la mascarilla LED, elija productos de ingredientes naturales de alta calidad.
- 3) El material de la mascarilla es silicona médica, que puede tener un olor al abrir el paquete, pero desaparecerá rápidamente.
- 4) La mascarilla de silicona contiene fuentes de luz LED y una placa PCB. No doble, apriete ni presione fuertemente la mascarilla.
- 5) Use la mascarilla LED en la cama y guárdela en su caja después del tratamiento, no la deje sobre la cama.
- 6) No limpie la mascarilla LED con agua ni la sumerja. Use un paño húmedo. La mascarilla suavizante sí puede lavarse con agua.
- 7) No use líquidos químicos para limpiar la mascarilla LED ni la mascarilla suavizante.
- 8) No la esponja directamente a la luz solar.

5. Servicio de mantenimiento


- 5.1 El instrumento tiene una garantía de un año, excepto los accesorios y consumibles. Brindaremos servicio de mantenimiento después del período de garantía, pero deberá abonarse.
- 5.2 Si desea reponer o adquirir los consumibles y accesorios, póngase en contacto con el distribuidor para obtener asesoramiento.
- 5.3 Las averías causadas por causas humanas como las que se indican a continuación quedan fuera de nuestra garantía.
 - a) Averías causadas por desmontaje o transformación del instrumento por parte del propio cliente.
 - b) Averías causadas por un mantenimiento incorrecto o irrazonable.
 - c) Roturas causadas por golpes o caídas del instrumento.
 - d) Avería causada por manejo incorrecto.
 - e) Daños causados por desastres irresistibles como terremotos o incendios.
- 5.4 Bienvenidos a cualquier comentario y sugerencia.
- 5.5 Al limpiar máquinas, utilice una toalla suave y seca para retirar el polvo y una toalla suave y húmeda para retirar la suciedad.

a la textura de los músculos.

5) El tiempo total de trabajo es de 15 minutos.

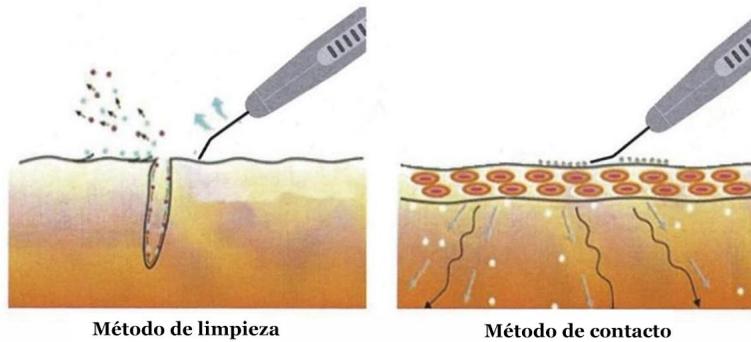

4.7 Uso para Mascarilla

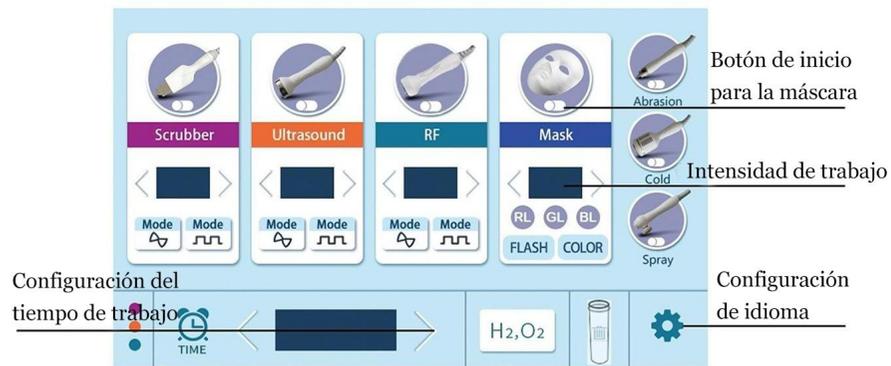

4.7.1 Resuelve fundamentalmente el problema del blanqueamiento y el envejecimiento de la piel, permite aumentar la actividad de las células; Promueve el metabolismo celular, hace que la piel secrete colágeno y tejido fibroso para rellenarse. Acelera el reflujo sanguíneo, aumenta la elasticidad de la piel y mejora la tez de la piel, las condiciones opacas, para lograr blanqueamiento, rejuvenecimiento de la piel, arrugas, reparación, etc. Efecto imperfección. Los instrumentos se basaron en la actualización de la tecnología original, utilizando siete colores diferentes de luz fría, a saber, rojo, azul, verde, amarillo, violeta, azul, luz láser, cada luz tiene un efecto diferente. Puede tratar diferentes problemas de la piel gracias a la eficacia de una variedad de instrumentos, prácticos y asequibles.

2. Precaución

- 1) Apague la alimentación si es necesario cambiar el fusible.
- 2) Desconecte el cable de alimentación si necesita mover la máquina.
- 3) El equipo debe colocarse en un ambiente con temperatura entre 5°C y 40°C, en interiores limpios y alejado de la luz solar directa. Asegúrese de que las rejillas de ventilación no estén obstruidas. No coloque ningún objeto sobre el equipo bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de forma temporal.
- 4) Instale los instrumentos con sus sondas según la imagen inferior. Coloque los mangos en el soporte de accesorios, asegurándose de que queden en sus posiciones correctas.
- 5) Evite el uso de productos cosméticos o para el cuidado de la piel que puedan irritar durante las 24 horas posteriores al tratamiento. Además, proteja la zona tratada de la exposición solar.
- 6) Aplique una mascarilla hidratante durante una semana después del tratamiento.
- 7) Aquellos que no utilizan la máquina:
 - a) Mujeres embarazadas
 - b) Enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, cáncer, diabetes
 - c) Zonas con infecciones bacterianas
 - d) Pacientes con cicatrices queloides
 - e) Personas con marcapasos
 - f) Piel extremadamente sensible o con enfermedades dermatológicas
 - g) Pacientes con eritema
 - h) Quienes tienen cutículas finas no pueden usar el mango hidrofacial
 - i) Las personas con cutícula fina no pueden utilizar RF durante más de 20 minutos
 - j) No utilice la máquina en caso de alergias graves o acné severo
- 9) Si el paciente se siente incómodo, apague la máquina en caso de peligro


3. Cómo instalar el instrumento



- 3.2 Al mover el instrumento, retire todo el líquido de las botellas A, B, C y D; de lo contrario, el líquido entrará en el interior del instrumento durante el movimiento y lo dañará.
- 3.3 Al utilizar el instrumento, si este emite un pitido, observe la interfaz de la botella de agua usada. Si parpadea, vacíe el agua usada e instale la botella de agua usada en el instrumento después de vaciarla.


- 4.5.4 Utilizando el mango ultrasónico, manténgase cerca del área a tratar y presione el botón de inicio en la pantalla para iniciar la función ultrasónica.
- 4.5.5 Siguiendo la línea del contorno, haga movimientos circulares sobre el área a tratar durante unos 5-8 minutos.

4.6 Uso del Exfoliador de piel

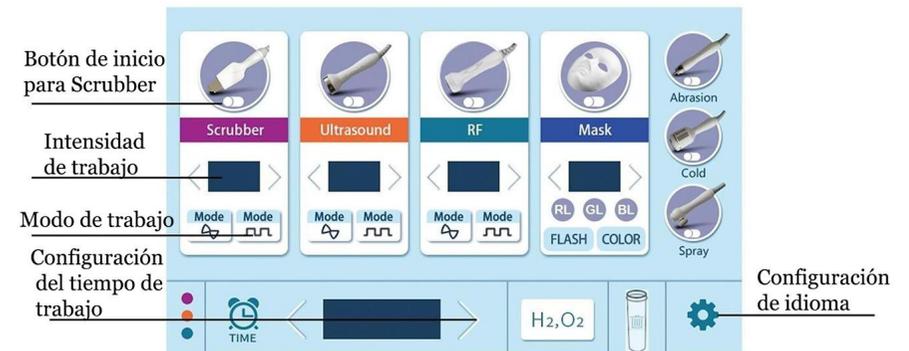


- 4.6.1 Limpieza del área a tratar antes de utilizar el tratamiento.
- 4.6.2 Ajuste el tiempo de trabajo, la intensidad y el modo antes de usar.
- 4.6.3 Utilizando el método de limpieza para eliminar la suciedad de la superficie de la piel.
 - 1) Usando el limpiador facial para limpiar la piel.
 - 2) Esterilice el depurador de piel antes de usarlo y deje que el cliente sostenga la pegatina al usarlo.
 - 3) Aplicando suficiente agua sobre la piel.
 - 4) La cuchilla está inclinada a 45 grados, asegúrese de que esté cerca de la piel, moviéndose hacia arriba y hacia abajo a velocidad moderada.
 - 5) El tiempo total de trabajo es de 20 minutos.
- 4.6.4 Utilizando el método táctil para realizar masaje linfático.
 - 1) Usando el limpiador facial para limpiar la piel.
 - 2) Esterilice el depurador de piel antes de usarlo y deje que el cliente sostenga la pegatina al usarlo.
 - 3) Aplicar suficientes productos para el cuidado de la piel sobre la piel.
 - 4) Aplane el cabezal del depurador de piel con la piel y muévelo en consecuencia.

4.4 Utilizando para RF

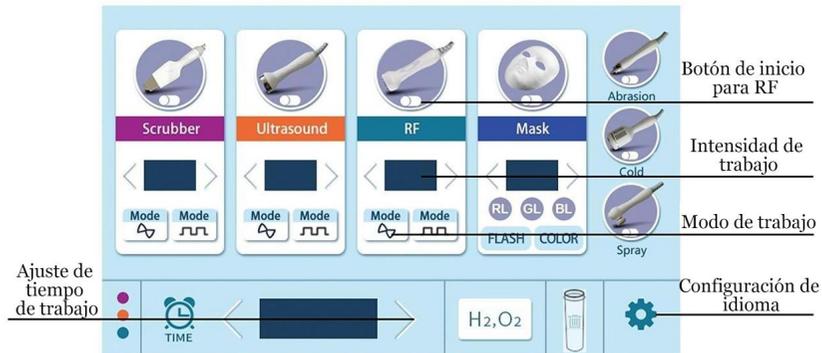

- 4.4.1 Limpiar el área de tratamiento antes de utilizar el instrumento.
- 4.4.2 Aplicar gel adecuado en el área de tratamiento.
- 4.4.3 Ajustar el tiempo de trabajo, la intensidad de RF y el modo de RF antes de usar.
- 4.4.4 Utilizar el mango de RF manteniéndolo cerca del área de tratamiento y presionar el botón de inicio en la pantalla para activar la función de RF.
- 4.4.5 Realizar movimientos circulares de abajo hacia arriba siguiendo las líneas faciales y del cuello para lograr desintoxicación. El tiempo de operación por cada área debe ser de aproximadamente 10-15 minutos.


4.5 Utilizando para ultrasonido

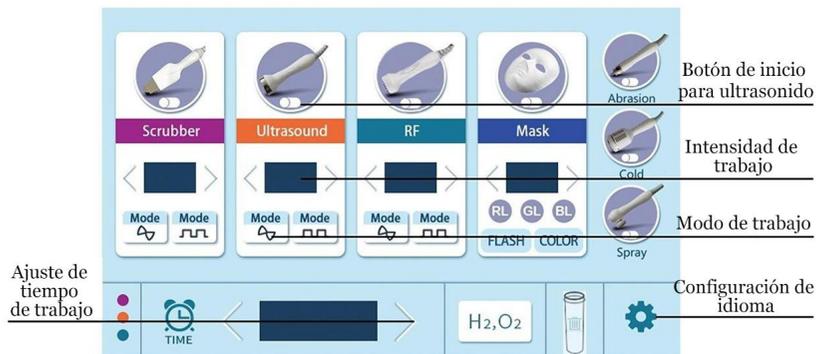

- 4.5.1 Limpiar el área de tratamiento antes de utilizar el equipo.
- 4.5.2 Aplicar gel adecuado en el área de tratamiento.
- 4.5.3 Ajustar el tiempo de trabajo, la intensidad de ultrasonido y el modo de ultrasonido antes de utilizar.

4. Procedimientos y métodos de operación

4.1 Utilizando para mango de Aqua facial

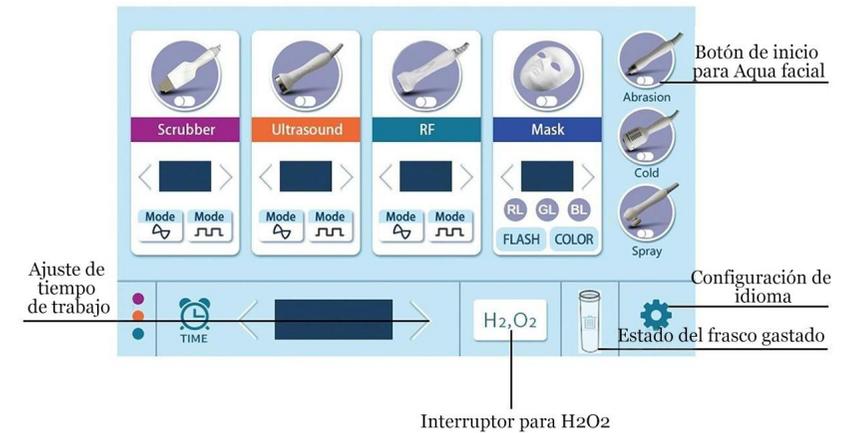

- 4.1.1 Limpiar el rostro utilizando un limpiador facial.
- 4.1.2 Seleccionar el cabezal de limpieza Aqua Facial según el tipo de piel. Seleccionar el líquido (A, B, C) girando el dial o el H2O2 .
- 4.1.3 Ajustar el nivel de flujo y la palanca de presión para comenzar a trabajar. El procedimiento completo de limpieza puede durar aproximadamente 10 minutos.

Precaución:

