

Manual del usuario

HR-AS23



Contenido

Precauciones de seguridad	1
Contraindicaciones	1
Descripción general	2
Introducción al panel de control	3
Especificaciones técnicas	8
Precauciones de uso	9
Mantenimiento y limpieza	10
Preguntas frecuentes	10
Preguntas y respuestas	12
Guía de funcionamiento	13
Garantía y soporte técnico	23

1.Precauciones de seguridad

1. Lea este manual detenidamente antes de usarlo y familiarícese con el funcionamiento de este dispositivo y la tecnología relacionada.
2. Al ser un dispositivo electrónico de alta precisión, este dispositivo debe almacenarse correctamente. Evite la humedad, la luz solar directa y la proximidad a materiales inflamables o explosivos para evitar daños.
3. Utilice siempre el accesorio designado o recomendado por el fabricante para garantizar su correcto funcionamiento durante toda su vida útil.
4. No exponga el dispositivo a altas temperaturas, ya que esto podría afectar negativamente su vida útil y rendimiento.
5. No aplique el dispositivo sobre los ojos, la tiroides, las paratiroides, los testículos, el abdomen de mujeres embarazadas, marcapasos, etc.
6. Los pacientes deben consultar a su médico antes de usar este dispositivo.
7. Asegúrese de aplicar el dispositivo sobre la piel húmeda y evite la operación sobre piel seca.
8. Apague el dispositivo cuando no esté en uso para garantizar su seguridad.
9. Para mantener la higiene y prolongar la vida útil del dispositivo, esterilícelo con solución salina.

2.Contraindicaciones

Antes de usar este dispositivo, es fundamental consultar con su médico o buscar asesoramiento profesional. Detalles a continuación:


1. Embarazo, lactancia, enfermedades cardíacas, tumores malignos, foliculitis, enfermedades vasculares, hipertensión grave, niveles altos de azúcar en sangre, niveles altos de grasas en sangre.


2. Epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
3. Anormalidades en el metabolismo del colágeno, incluyendo antecedentes de cicatrices y mala cicatrización de heridas.
4. Infección activa, herpes simple, lesiones cutáneas, hematomas, etc.
5. Heridas recientes de cirugía plástica que no hayan cicatrizado completamente.
6. Alergias cutáneas.
7. Presencia de marcapasos.
8. Reacciones fotoalérgicas (erupción solar, eritema), enrojecimiento, hinchazón y picazón por exposición solar.
9. Uso reciente de tratamientos fotoeléctricos en la misma zona en los últimos 30 días.
10. Niños y personas menores de 18 años en la etapa de desarrollo puberal.
11. Toma actual de medicamentos antioxidantes u hormonales.

3.Descripción general



Este avanzado dispositivo de belleza combina las últimas tecnologías de cuidado corporal y facial, utilizando métodos de rejuvenecimiento de la piel de vanguardia, respaldados por múltiples estudios clínicos. Diseñado para todo tipo y tono de piel, garantiza seguridad y eficacia. Además, incorpora los últimos avances en belleza óptica, superando las limitaciones de la depilación tradicional: resultados lentos y molestias. Esta innovación proporciona una depilación rápida e indolora, marcando un hito en la tecnología de depilación óptica y ofreciendo una experiencia cómoda e inigualable para quienes buscan belleza.

4.Introducción al panel de control

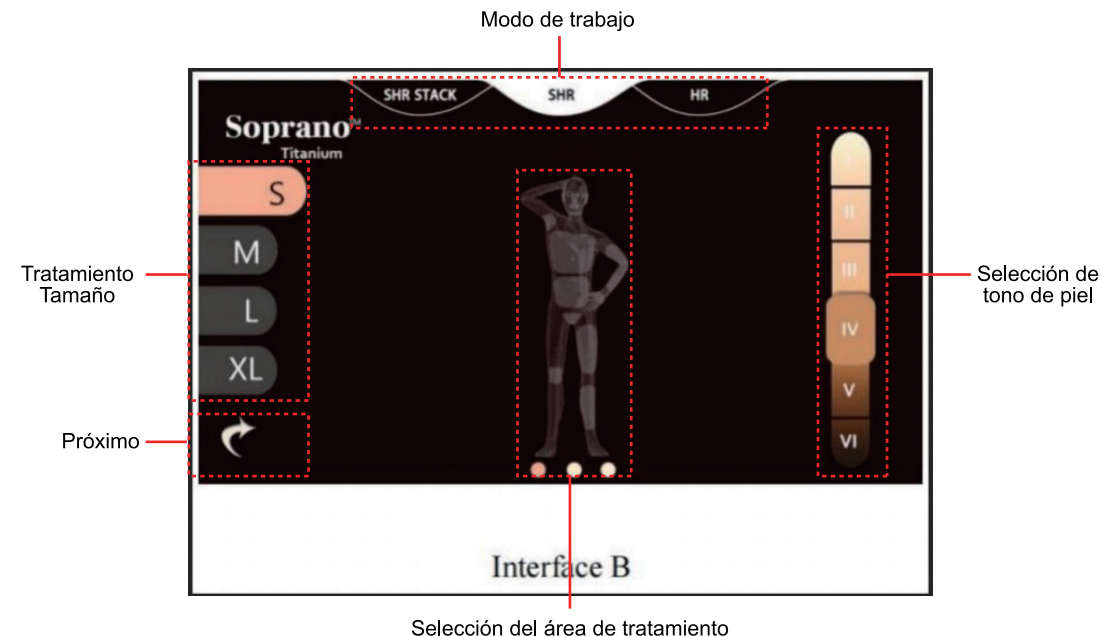

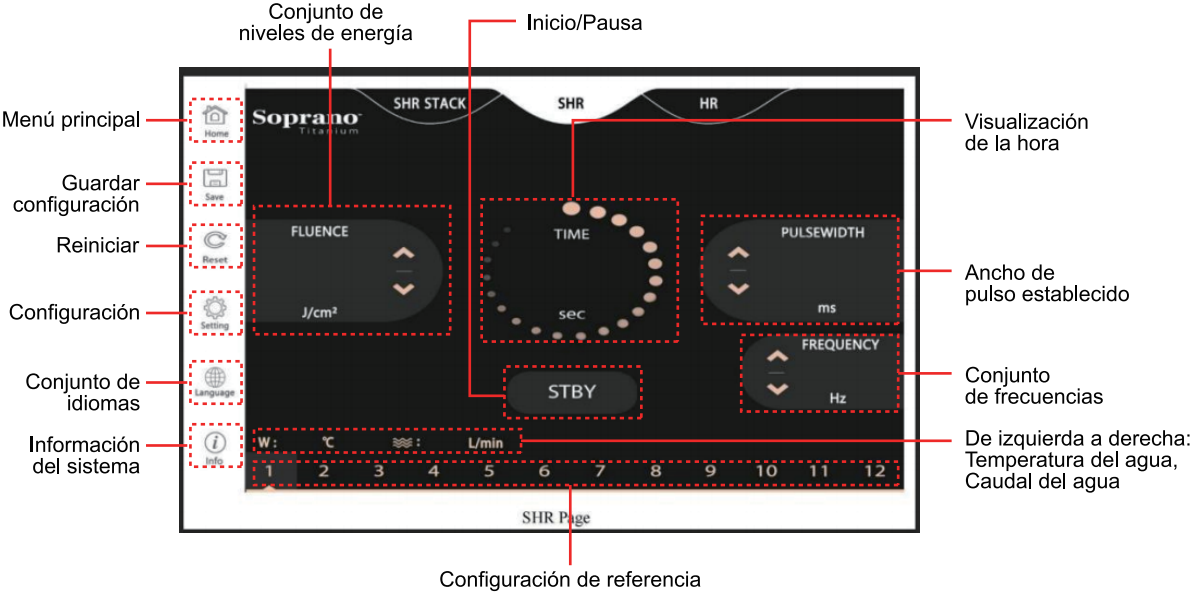

Número de cuadrículas	Tiempo(s) de tratamiento
1	200
2	400
3	600
4	800
5	1000
6	1200
7	1400
8	1600
9	1800
10	2000
11	2200
12	2400

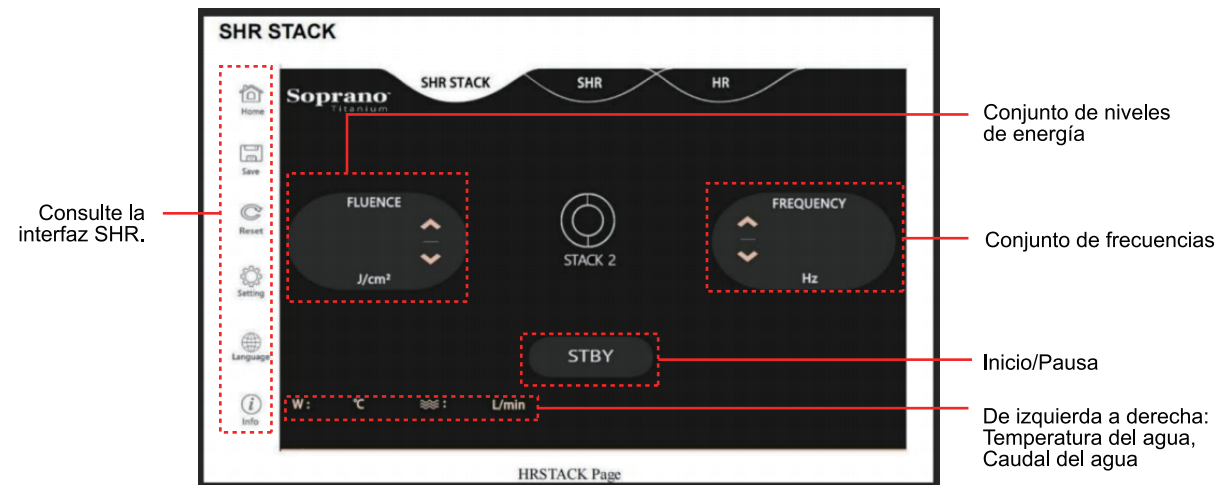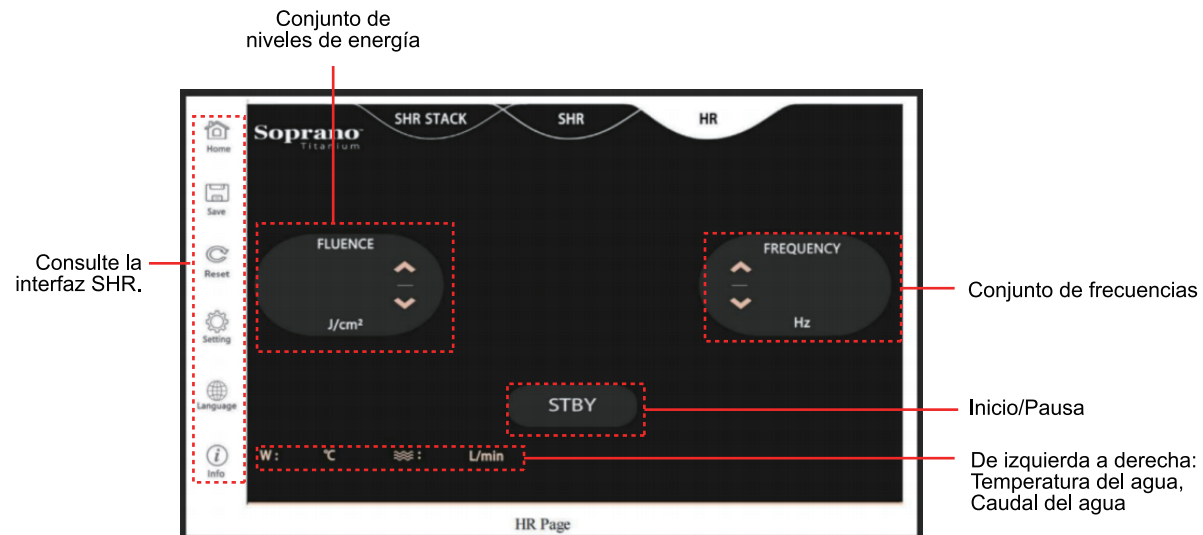

5. Especificaciones técnicas

Principal Máquinas	Tipo de láser	Láser de diodo
	Entrada VCA	220 V CA/50-60 Hz
	Temperatura de refrigeración	-5 °C--5 °C
	Método de refrigeración del sistema	Agua + Ventilador + TEC + Zafiro
	Idioma de la interfaz	Inglés
	Pantalla	Pantalla táctil a color de 15,6 pulgadas (1920 x 1080)
	Dimensiones de la carcasa de aluminio (máquina)	68 x 64 x 127 cm
	Peso bruto	75 kg
	Líquido refrigerante del láser	Agua pura
	Volumen del depósito de agua	4 L
	Temperatura del entorno de trabajo	15-28 °C
	Humedad ambiental	<70 %
Mango 1	Longitud de onda	808 nm o 755 nm, 808 nm y 1064 nm
	Potencia	3000 W
	Ancho de pulso	1 ms-400 ms
	Frecuencia	1 Hz-10 Hz
	Tamaño del punto	15 x 40 mm

6. Precauciones de uso

1. Siga estrictamente las instrucciones del manual para usar el dispositivo y capacitar al operador.
2. Antes de usar el dispositivo, utilice un enchufe con toma de tierra y asegúrese de que la toma de corriente esté conectada a tierra.
3. Asegúrese de que el voltaje del dispositivo sea adecuado. Si el voltaje de la fuente de alimentación local es inestable, recomendamos conectar una fuente de alimentación regulada y compatible entre la red eléctrica y el dispositivo.
4. Retire todos los objetos metálicos del cuerpo para evitar accidentes o afectar los efectos del tratamiento.
5. Mantenga el mango en movimiento sobre la piel para evitar quemaduras. Asegúrese de que el cabezal de tratamiento permanezca en contacto total con la piel, ya que una fuga de luz podría afectar los resultados o causar quemaduras.
6. Si ha sufrido una quemadura solar reciente o planea exponerse al sol, espere al menos 15 días antes de usar el dispositivo. 7. Se recomienda a las personas con piel muy oscura (p. ej., africanos o indios) evitar el uso de este dispositivo, incluso si su piel parece más clara que la de otras personas de la misma raza, ya que podrían absorber una energía láser excesiva, lo que podría dañar la piel.
8. No utilice el dispositivo en las cejas, las pestañas ni alrededor de los ojos.
9. Después de usar el dispositivo durante aproximadamente 2 horas, apáguelo y déjelo reposar de 5 a 10 minutos para prolongar su vida útil.
10. Tanto el receptor como el operador deben usar gafas protectoras para evitar daños oculares causados por el láser.

7. Mantenimiento y limpieza

1. Desconecte el cable de alimentación cuando no lo utilice y guarde el dispositivo en un lugar seco, fresco y bien ventilado.
2. Limpie y desinfecte el mango con un paño húmedo o solución salina, y luego séquelo bien con una toalla seca para asegurar que permanezca seco.
3. Después de limpiar el dispositivo, cúbralo con un paño o film transparente. Antes de usarlo, asegúrese de desinfectar el mango de nuevo por razones de higiene.
4. Está estrictamente prohibido desmontar el dispositivo e intentar limpiar el interior. Esta tarea solo debe ser realizada por profesionales.

8. Preguntas frecuentes

1. ¿Puedo lograr la depilación permanente con un solo tratamiento láser?

R: No. Se requiere un tratamiento completo para obtener resultados satisfactorios. El vello crece en tres ciclos: anágeno, de reposo y de regresión. La depilación láser es más efectiva durante la fase anágena, pero dado que los folículos pilosos tienen ciclos diferentes, se requieren varias sesiones. Los tratamientos suelen programarse cada 3 a 6 semanas, según la zona a tratar y los patrones individuales de crecimiento del vello. Un plan de tratamiento personalizado garantiza resultados óptimos y duraderos.

2. ¿La depilación es perjudicial para la piel?

R: No, es seguro. El tratamiento se basa en el principio de la fototermólisis selectiva, lo que significa que la longitud de onda específica actúa únicamente sobre la melanina del folículo piloso sin afectar el tejido cutáneo circundante. Dado que la piel circundante contiene poca o ninguna melanina a esa longitud de onda, permanece intacta, lo que garantiza un procedimiento seguro y eficaz.

3. ¿La depilación láser hará que el vello de la zona tratada sea más oscuro?

R: No, todo lo contrario. La depilación láser suele provocar un recrecimiento de vello más fino y claro en la zona tratada. Los métodos tradicionales de depilación, como el afeitado, la depilación, las cremas depilatorias o la cera, pueden provocar un recrecimiento de vello más grueso y oscuro.

4. ¿Es la depilación láser adecuada para todos?

R: No. Si bien la depilación láser tiene una amplia gama de aplicaciones, las personas con las siguientes afecciones deben evitarla:

- (1) Antecedentes de cicatrices queloides
- (2) Antecedentes de infección actual o infección por herpes simple en la zona a tratar
- (3) Uso de otros métodos de depilación en las últimas 4 semanas
- (4) Alergia a hidroquinonas u otros agentes blanqueadores

Constitución alérgica

5. ¿Existe una época preferible para la depilación láser?

R: La depilación láser es una opción disponible durante todo el año, sin preferencias estacionales específicas. Es un procedimiento no invasivo sin tiempo de recuperación, lo que permite flexibilidad para el tratamiento en cualquier momento. Sin embargo, comenzar el tratamiento antes permite completar las sesiones múltiples antes, lo que le da una piel más suave.

6. ¿Puedo broncearme inmediatamente después de un tratamiento de depilación?

R: No, todo lo contrario. Depilación láser. R: No, el bronceado debe posponerse. Después del tratamiento láser, tanto los folículos pilosos como la cutícula se desprenden, reduciendo temporalmente la barrera protectora de la piel. Para prevenir la irritación y posibles daños, es fundamental evitar la exposición al sol durante este periodo.

7. ¿Cuánto tiempo debo evitar el contacto del agua con el área tratada después del tratamiento con láser?

R: La zona tratada no debe entrar en contacto con el agua hasta después de una semana. Las costras suelen formarse de 3 a 5 días después de la cirugía y cicatrizan en unos 5 a 7 días, por lo que es necesario evitar el contacto con el agua durante la primera semana.

9. Preguntas y respuestas

1. No se enciende el dispositivo y la luz del botón en la parte posterior de la unidad principal está apagada.

- A. Asegúrese de que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que funcione.
- B. Compruebe si el fusible está suelto o quemado.
- C. Compruebe si el botón de emergencia está activado.
- D. Compruebe si el interruptor de llave está activado.

2. Mango caliente anormal.

- A. Voltaje insuficiente. Compruebe la fuente de alimentación y el circuito eléctrico.
- B. Uso prolongado del mango. Apague el dispositivo y espere de 10 a 15 minutos.

3. No se emite luz desde el cabezal de tratamiento.

- A. Asegúrese de que el tratamiento esté activado pulsando el botón "STBY" en la pantalla.
- B. Compruebe que el botón del mango funcione correctamente.
- C. Reinicie el dispositivo y vuelva a intentarlo.

4. Olor peculiar durante el funcionamiento.

- A. Verifique si la ventana de salida de luz tiene manchas o restos de cabello.
- B. Limpie la ventana de salida de luz.

5. Alarma en la barra de estado.

- A. Compruebe si la temperatura del agua supera los 35 °C; espere a que se enfríe si es necesario.
- B. Si el caudal de agua es inferior a 2 l/min, inspeccione la manguera para detectar obstrucciones y asegúrese de que el mango esté bien conectado a la unidad principal. Si el caudal es de 0 l/min, verifique que la bomba de agua funcione correctamente o contacte con su distribuidor.

10. Guía de funcionamiento

Depilación corporal

1. Efecto

Elimina el vello no deseado del área objetivo.

2. Operación de la manija

Preparación: Maquinilla de afeitar, toalla desechable, toalla de papel, gel, mascarilla en barra.

1. Seleccione la función deseada.
2. Afeite la zona a tratar con la maquinilla.
3. Retire el vello afeitado.
4. Aplique una capa de gel de 2 cm uniformemente sobre la zona a tratar.
5. Proporcione gafas protectoras al paciente.
6. El operador también debe usar gafas protectoras.
7. Utilizando la técnica de estampado, trate toda la zona horizontal y luego verticalmente, repitiendo de 5 a 8 veces.

Raspe el gel con la espátula y limpie cualquier residuo con pañuelos de papel.

7. Con la técnica de estampado, trate toda la zona horizontal y luego verticalmente.

8. Raspe el gel con la espátula y limpie cualquier residuo con pañuelos de papel.

3.Cuidados después del tratamiento

1. Mantenga una rutina diaria saludable después de la operación y equilibre el trabajo con el descanso.

2. Evite la sauna de vapor, las aguas termales, la natación y la exposición al sol durante los próximos 7 días.

4.Programa de tratamiento

Tome 1 sesión cada 22 a 32 días, complete de 6 a 12 sesiones en total y personalice el programa de tratamiento según la condición del individuo.

Depilación facial

1.Efecto

Elimina el vello no deseado de la cara.

2.Operación de la manija

Preparación: Lavabo, bolsa desechable, toallita desechable, raspador de mascarilla, maquinilla de afeitar, desmaquillante, limpiador, tónico, esencia, gel, mascarilla facial, loción/crema, protector solar.

1. Desmaquillar y limpiar la piel.

2. Afeitar la zona a tratar con la maquinilla.

3. Retirar el vello afeitado.

4. Aplicar una capa de gel de 2 cm uniformemente sobre la zona a tratar.

5. Proporcionar gafas protectoras al paciente.

6. El operador también debe usar gafas protectoras.

7. Comience por la zona del mentón y utilice la técnica de estampado para cubrir toda la zona, comenzando horizontalmente y luego moviéndose verticalmente (5-8 veces).

8. Retire el gel con la rasqueta y limpie cualquier residuo.

9. Aplique una mascarilla en el rostro.

10. Limpie el rostro durante 2 minutos.

11. Aplique tónico, esencia, loción/crema y protector solar.

3.Antes y después del tratamiento

1. Si ha usado ungüento tópico de ácido A o productos para eliminar imperfecciones antes de la operación, se recomienda suspender el medicamento durante una semana antes de iniciar el tratamiento de fotorrejuvenecimiento.

2. Evite someterse a tratamientos de belleza con láser, dermoabrasión o rejuvenecimiento cutáneo con ácidos de frutas una semana antes y después de la operación.

3. Mantenga una rutina diaria saludable después de la operación y equilibre el trabajo con el descanso.

4. Aplique al menos una mascarilla hidratante todos los días durante una semana después del tratamiento y evite usar productos para el cuidado de la piel y cosméticos que contengan irritantes como ácidos de frutas, ácido salicílico y alcohol.

5. Evite la sauna de vapor, las aguas termales, la natación y la exposición al sol en los últimos 7 días.

6. Refuerce la protección solar usando protector solar físico al aire libre, como llevar un paraguas.

4.Programa de tratamiento

Tome 1 sesión cada 22 a 32 días, complete de 6 a 12 sesiones en total y personalice el programa de tratamiento según la condición del individuo.

Fotorejuvenecimiento

1.Efecto

1. Reduce las imperfecciones de la piel y minimiza los poros.
2. Alivia el tono apagado de la piel y los problemas de pigmentación.
3. Aumenta la elasticidad de la piel para combatir el envejecimiento.
4. Suaviza las arrugas superficiales y refina la textura de la piel.
5. Rejuvenece eficazmente la piel, corrigiendo arrugas y manchas.
6. Mejora la dilatación capilar y reduce el enrojecimiento.
7. Posee propiedades antisépticas y antiinflamatorias, lo que ayuda a prevenir el acné.

2.Operación de tratamiento

Preparación: Lavabo, bolsa desechable, toallita desechable, raspador de mascarilla, maquinilla de afeitar, desmaquillante, limpiador, tónico, esencia, gel, mascarilla facial, loción/crema, protector solar.

1. Desmaquillar y limpiar la piel.
2. Aplicar una capa de gel de 2 cm uniformemente sobre la zona a tratar.
3. Proporcionar gafas protectoras al paciente.
4. El operador también debe usar gafas protectoras.
5. Comenzar por la zona del mentón y aplicar una técnica de estampado para cubrir toda la zona, comenzando horizontalmente y luego avanzando verticalmente (5-8 veces).
6. Raspar el gel con el raspador y retirar cualquier residuo.
7. Aplicar la mascarilla en el rostro.

8. Limpiar el rostro durante 2 minutos.
9. Aplicar el tónico, la esencia, la loción/crema y el protector solar.

3.Antes y después del tratamiento

1. Si ha usado ungüento tópico de ácido A o productos para eliminar imperfecciones antes de la operación, se recomienda suspender el medicamento durante una semana antes de iniciar el tratamiento de fotorrejuvenecimiento.
2. Evite tratamientos de belleza con láser, dermoabrasión o rejuvenecimiento cutáneo con ácidos de frutas una semana antes y después de la operación.
3. Mantenga una rutina diaria saludable después de la operación y equilibre el trabajo con el descanso.
4. Aplique al menos una mascarilla hidratante al día durante una semana después del tratamiento y evite usar productos para el cuidado de la piel y cosméticos que contengan irritantes como ácidos de frutas, ácido salicílico y alcohol.
5. Evite la sauna de vapor, las aguas termales, la natación y la exposición al sol en los últimos 7 días.
6. Refuerce la protección solar usando protector solar físico al aire libre, como llevar un paraguas.

4.Programa de tratamiento

Tomar 1 sesión cada 22 a 32 días, completar de 6 a 12 sesiones en total.

Eliminación de tatuajes de cejas

1. Crear un perfil del cliente, recopilando información como la fecha del tatuaje, historial de eliminación de tatuajes, método utilizado (si lo hay), presencia de cicatrices y antecedentes alérgicos. Informarle sobre las reacciones esperadas en la zona tratada después del tratamiento y orientarle sobre los cuidados posteriores.

2. Haga que el cliente se recueste en la camilla, afeite la ceja, limpie la zona a tratar y asegúrese de que permanezca seca.

3. Proporcione al cliente un antifaz y espere a que el dispositivo esté listo.

4. El cliente debe mantener los ojos cerrados durante el tratamiento y el operador debe seleccionar la intensidad del láser según el tono de la zona a tratar. Comience por la zona a tratar para que el cliente se aclimate. Mantenga la sonda a una distancia de uno o dos dedos de la piel del cliente y mueva el mango sobre la ceja desde la raíz hasta la cola. Si el tatuaje reaparece entre 5 y 10 minutos después del tratamiento, repita el proceso. Es necesario realizar una revisión al mes y medio. El cliente puede optar por otra sesión si quedan residuos.

Eliminación de tatuajes de cejas

1. Cree un perfil del cliente, recopilando información como la fecha del tatuaje, historial de eliminación de tatuajes previos, método utilizado (si lo hubiera), presencia de cicatrices y constitución alérgica. Infórmele sobre las reacciones esperadas en la zona tratada después del tratamiento y proporcione orientación sobre los cuidados posteriores.

2. Haga que el cliente se recueste en la camilla, limpie la zona a tratar y asegúrese de que permanezca seca.

3. Inicie el tratamiento una vez que el dispositivo esté listo.

4. Ajuste el brillo del indicador al mínimo. Mantenga la sonda a una distancia de 2 a 3 dedos de la piel del cliente, asegurándose de que se vea claramente un punto brillante. Proteja completamente el ojo del cliente con una gasa médica de 1 cm de grosor o una placa para párpados. Comience con el delineador inferior. Indique al cliente que cierre los ojos mirando hacia arriba. El operador empuja suavemente el párpado superior del cliente hacia arriba con el dedo índice y el párpado inferior hacia abajo con el dedo medio durante el tratamiento. Al retirar el delineador superior, indique al cliente que cierre los ojos y mire hacia abajo. El operador presiona la cubierta sobre el párpado superior con el

dedo medio mientras empuja el párpado superior hacia arriba con el dedo índice durante el tratamiento. Mantenga un intervalo de 45 a 60 días entre cada sesión, continuando con sesiones regulares hasta lograr la eliminación completa.

Eliminación de tatuajes de labios

1. Cree un perfil del cliente, recopilando información como la fecha del tatuaje, historial de eliminación de tatuajes previos, método utilizado (si lo hubiera), presencia de cicatrices y antecedentes alérgicos. Infórmele sobre las reacciones esperadas en la zona tratada después del tratamiento y proporcione orientación sobre los cuidados posteriores.

2. Haga que el cliente se recueste en la camilla, limpie la zona a tratar y asegúrese de que permanezca seca.

3. Proporcione un protector ocular al cliente y espere a que el dispositivo esté listo.

Mantenga la sonda a una distancia de 3 a 4 dedos de la piel del cliente. Para tatuajes labiales de color negro, café, carmesí y marrón, inicie el tratamiento con la sonda infrarroja de 1064 nm y repítalo con la sonda de 532 nm. Para tatuajes de color rojo claro, rojo o café claro, utilice solo la sonda de 532 nm. Precaución: Para cualquier tatuaje labial, espere al menos 6 meses después de la eliminación para evitar un posible fracaso del tratamiento. Mantener un intervalo de 45-60 días entre cada sesión, continuando con sesiones regulares hasta conseguir la eliminación completa.

Eliminación de tatuajes corporales

1. Crear un perfil del cliente, recopilando información como la fecha del tatuaje, historial de eliminación de tatuajes, método utilizado (si lo hay), presencia de cicatrices y antecedentes alérgicos. Informarle sobre las reacciones esperadas en la zona tratada después del tratamiento y orientarle sobre los cuidados posteriores.

2. Acostar al cliente en la camilla, limpiar la zona tratada y asegurarse de que permanezca seca.

3. Proporcione al cliente un antifaz y espere a que el dispositivo esté listo.
4. Ajuste la frecuencia a 3-5 Hz. Coloque la sonda a 3-4 dedos de la piel y utilice una mayor intensidad de energía si el cliente la tolera, asegurándose de que no aparezca sangre en la zona tratada. Para tatuajes azul oscuro, utilice una sonda de 1064 nm, mientras que para tatuajes rojos y café, una sonda de 532 nm. Mantenga un intervalo de 45 a 90 días entre cada sesión, continuando con sesiones regulares hasta lograr la eliminación completa.

Rejuvenecimiento de la piel

1. Desmaquillar y limpiar la piel.
2. Aplicar gel de carbón en la zona a tratar y esperar a que se seque. Aplicar el tónico en la zona a tratar y esperar a que se seque. El operador debe dejar funcionar la máquina durante unos minutos para asegurar la correcta circulación del agua en el interior y prolongar la vida útil del dispositivo.
3. Proporcionar una protección ocular al cliente y esperar a que el dispositivo esté listo.
4. Ajustar la frecuencia a 3 Hz e iniciar con la intensidad de energía más baja. Colocar el mango en un ángulo de 90° sobre la piel, manteniendo una distancia de 1 a 2 dedos. Mantener presionado el pedal y mover el mango lenta y horizontalmente sobre la zona a tratar. Mantener un intervalo de 1 mes entre cada sesión.
5. Retirar el gel y aplicar una mascarilla facial.
6. Limpiar el rostro.
7. Aplicar el tónico, la esencia, la loción/crema y el protector solar.

Precaución:

1. La sonda de 1064 nm se utiliza para eliminar tatuajes azules, negros y cian.
2. La sonda de 532 nm se utiliza para eliminar tatuajes rojos, café y marrones.

3. La sonda de 1320 nm se utiliza para el rejuvenecimiento de la piel, la disminución de manchas y la luminosidad de la tez.

4. Coloque el mango en un ángulo de 90° sobre la piel, asegurándose de que el láser emitido esté perpendicular a la piel para evitar la pérdida de energía. Para la eliminación de tatuajes de cejas, delineador de ojos y labios, asegúrese de que el punto brillante del indicador forme una línea recta. Para la eliminación de manchas y nevos, divida el área en varias partes y trate cada una en varias sesiones, asegurándose de que no aparezca sangre en el área tratada.

5. Antes de la operación, coloque la sonda en el lugar correcto, presione el pedal para liberar el láser, levante primero el pedal y luego retire el mango.

Después de la operación, aplique ungüento antiinflamatorio y repita las precauciones postoperatorias al paciente.

Reacción durante la operación y cuidados postoperatorios

Gracias a la irradiación instantánea de alta energía del láser, los grupos de pigmento en la zona tratada se fragmentan rápidamente en pequeñas partículas que el cuerpo humano puede metabolizar. Una parte de la epidermis superficial se expulsa inmediatamente, mientras que los tejidos más profundos se distribuyen uniformemente por la epidermis. Esta es la razón de la reaparición de tatuajes y colores poco después de la operación. Al tratar tatuajes con colores intensos, la absorción intensa de la energía del láser por la melanina puede provocar enrojecimiento local, hinchazón, ampollas e incluso la formación de puntos sangrantes. Estas son respuestas inflamatorias normales de los tejidos, y el grado de inflamación local varía de una persona a otra. Una vez que la inflamación remite, tocar los tejidos puede causar picazón y sensación de rigidez. En general, las molestias suelen desaparecer por sí solas entre 3 y 7 días después de la operación. Sin embargo, en algunas personas, pueden persistir durante un período más prolongado, de 1 a 3 meses, dependiendo de su condición física. Después de la

operación, evite acciones que puedan causar infección en la zona sangrante, como depilarse las cejas, lavarse, exponerse al sol y otras actividades. Siga las indicaciones del médico, incluyendo las recomendaciones dietéticas. Evite alimentos picantes y estimulantes, mariscos, carne de res, cordero, etc., durante 3 a 7 días. No consuma alcohol. Si experimenta sangrado e inflamación intensos, se recomienda tomar antibióticos orales (acetilspiramicina) después de la cirugía. Además, aplique ungüento de eritromicina externamente durante el período de recuperación (72 horas después de la cirugía) en la zona afectada para facilitar la cicatrización. La solución restauradora también es útil.

Determinantes de la eliminación de tatuajes

1. Ingredientes de la tinta para tatuajes. Las tintas se clasifican en vegetales, compuestas y químicas. La dificultad de eliminación varía de fácil a difícil. Las tintas compuestas y químicas suelen contener minerales de hierro y plomo, lo que las hace propensas a depositarse profundamente en la piel y dificulta su eliminación.
2. Tono de color del tatuaje. Generalmente, los colores más oscuros son más difíciles de eliminar, lo que requiere más sesiones. Los colores más claros son más fáciles de eliminar con menos sesiones. Sin embargo, los tatuajes de tinta química, independientemente del tono de color, tienden a ofrecer resultados menos satisfactorios.
3. Diferencias físicas. Factores como la edad, el estado de la piel y el sistema inmunitario contribuyen a las variaciones en el proceso de eliminación.

11. Garantía y soporte técnico

Nombre del producto	Dispositivo de depilación láser
Producto Modelo:	HR-AS23
Fecha de producción:	
Inspección de calidad:	

