


— Manual del usuario —

ARISTORM

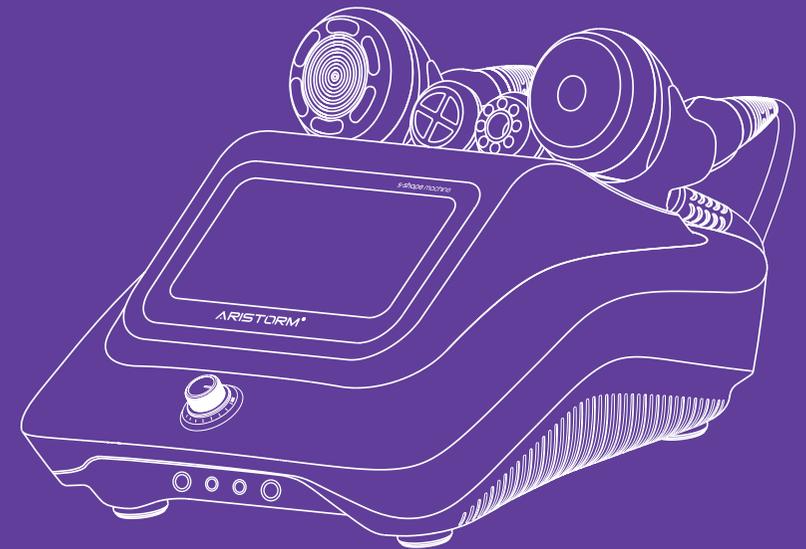

Gracias por elegir ARISTORM. Lea este manual detenidamente antes de usarlo. Es el instrumento más nuevo para adelgazar y reafirmar la piel. Este equipo combina radiofrecuencia y succión, EMS y electroestimulación, CAVI y RF, y 30k Pro, solucionando los problemas de piel y cuerpo de quienes buscan la belleza.

Lista de embalaje



Unidad principal*1

Piezas de mano corporales*2

Piezas de mano faciales*2

Cable de alimentación*1

Parámetros técnicos

Voltaje de entrada: AC 110V to 220V	Peso neto: 5.5KG
Dimensiones: 16.9in*12.3in*8.9in	Potencia de salida: 66W
Peso bruto: 7.1KG	Potencia de entrada: 80W



30k Pro

Frecuencia: 30K Hz

Fuerza: 80 W



CABLES Y RF

Frecuencia (CAVI): 30KHz

Frecuencia (RF): 5MHz

Fuerza: 40 W



RF y succión

Frecuencia: 10,000 Hz

Fuerza: 40 W

Succión: 55 cmHg

Caudal de aire (l/min): 10 LPM

Nivel de ruido (a 30 cm de distancia):

60 dB



EMS & EL

Frecuencia (EMS): 60 Hz

Frecuencia (EL): 3,000 Hz

Fuerza: 12 W

Diagrama de instalación



Retire las cuatro piezas de mano y conéctelas a los enchufes correspondientes en la unidad principal.

- | | |
|---|---|
| 1. Conecte RF&Suction al primer enchufe | 3. Conecte el 30K Pro al tercer enchufe |
| 2. Conecte EMS&EL al segundo enchufe | 4. Conecte CAVI&RF al último enchufe |

Precauciones de uso

1. El servicio posventa se ofrece en las tiendas designadas.
2. Utilice el dispositivo en un lugar con una temperatura entre 16 °C y 35 °C.
3. Limpie el dispositivo después de usarlo y manténgalo en buen estado para prolongar su vida útil.
4. Para garantizar el efecto terapéutico y la vida útil del dispositivo, utilice las piezas proporcionadas o sugeridas por el fabricante original.
5. No coloque el instrumento cerca de una fuente de calor intenso, ya que esto puede afectar su vida útil y su uso regular.
6. No utilice el equipo sobre los ojos, la tiroides, las paratiroides, los testículos, el abdomen de mujeres embarazadas, un marcapasos, etc.
7. Retire todos los objetos metálicos del cuerpo antes del tratamiento; de lo contrario, podrían ocurrir situaciones inesperadas que afecten el efecto terapéutico.
8. Apague el equipo si no lo utiliza nadie para garantizar su seguridad.
9. No se permite su uso a personas con stents metálicos implantados (excepto anillos anticonceptivos intrauterinos) ni prótesis mamarias.
10. No se permite su uso a mujeres durante la menstruación, el embarazo o la lactancia.
11. No se permite su uso a personas que hayan tenido una cesárea en los últimos seis meses, un aborto espontáneo en los últimos tres meses o un parto natural en los últimos dos meses.
12. Comience con el nivel de energía más bajo y aumentelo gradualmente después de acostumbrarse.
13. Debe aplicar gel en la zona tratada durante el uso; no utilice el instrumento si la piel está seca.
14. Utilice el equipo estrictamente y capacite a los operadores según las instrucciones del manual.
15. No se recomienda el uso del cabezal 30K Pro en manos y brazos debido a la celulitis fina.

Contraindicaciones


Las personas con las siguientes situaciones deben usar el equipo con precaución y consultar a un médico o profesional antes de utilizarlo. Los detalles son los siguientes:

1. Mujeres en período menstrual, embarazo o lactancia.
2. Personas con diabetes, cardiopatías, cicatrices, hipertiroidismo u otras enfermedades graves.
3. Personas que se hayan sometido recientemente a una cirugía y se encuentren en recuperación postoperatoria.
4. Personas con tumores malignos, hemofilia o hemorragia grave.
5. Personas con enfermedades de la piel o infecciosas.
6. Personas con alergias, piel muy sensible o alergia a metales.
7. Personas que se hayan sometido recientemente a una cirugía plástica o se hayan implantado prótesis u objetos metálicos en una zona tratada.
8. Personas que se hayan inyectado ácido hialurónico, se hayan sometido a un tratamiento de refuerzo cutáneo o a una inyección para la eliminación de arrugas o cirugía plástica (no usar en rostro ni cuello).
9. Personas con marcapasos (o dispositivos eléctricos similares), stents o implantes metálicos.
10. Se prohíbe su uso a menores de edad.




Introducción a la función de interfaz

Conecte el equipo, enciéndalo y aparecerá la siguiente interfaz inicial.

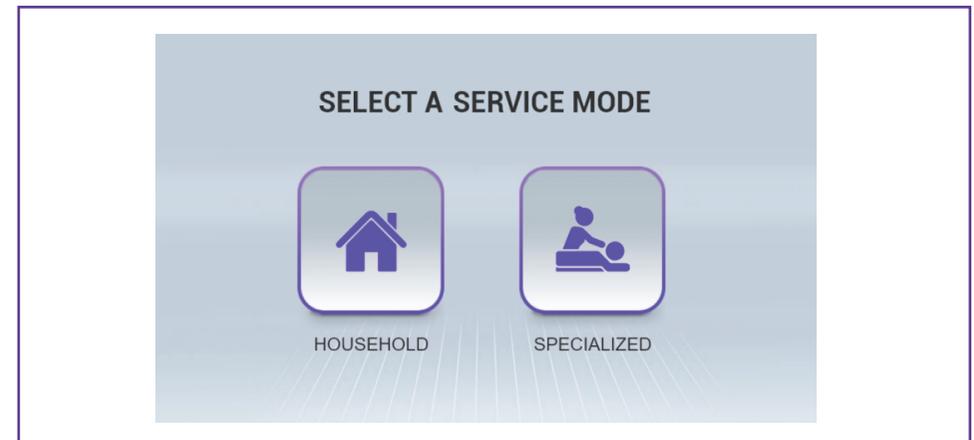

1. HOGAR | Presione enter a la siguiente pagina.

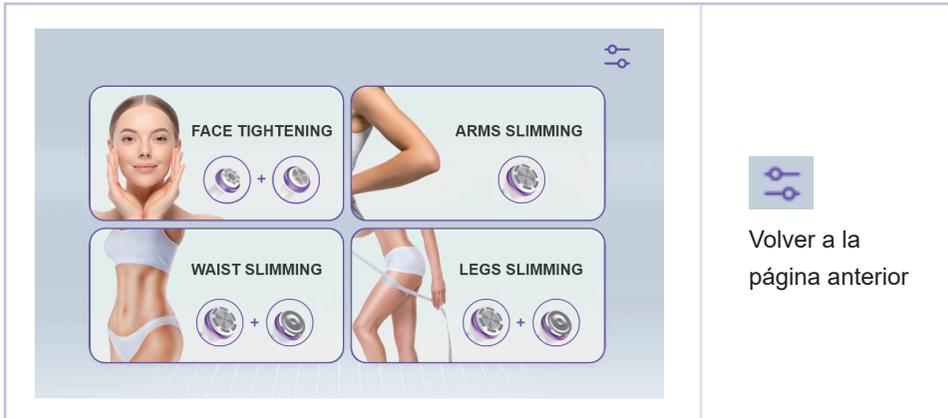

1.1 ESTIRAMIENTO FACIAL | Presione enter a la siguiente pagina.



Haga clic en este botón para iniciar el tratamiento. Los parámetros de RF y succión son predeterminados y se pueden ajustar manualmente según la tolerancia individual.

Barra de progreso


Volver a la página anterior

Suction Mode (the default mode is M3; you can select the mode manually)
M1: constant suction
M2: shorter interval between suction and release
M3: short interval between suction and release
M4: long interval between suction and release

Cuando aparezca esta interfaz, RF y SUCCIÓN dejarán de funcionar y se iniciarán EMS y EL. Cambie la pieza de mano a EMS y EL cuando la luz roja parpadee. El tiempo de aviso es de 30 segundos. Al finalizar el tiempo de aviso, cambiará automáticamente a la página EMS y EL.

Haga clic en este icono para ingresar a la página de EMS y EL con anticipación y presione el botón de inicio para operarlo.


Los parámetros son predeterminados y se pueden ajustar manualmente según la tolerancia individual.

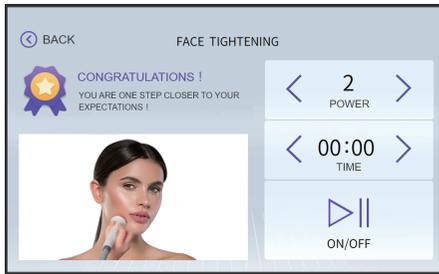


Quando veas esta interfaz habrás finalizado la operación.

1.2 ADELGAZAMIENTO DE BRAZOS

Presione enter a la siguiente pagina.

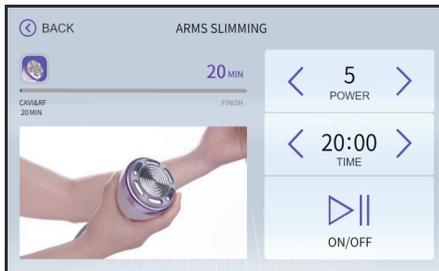


Haga clic en este botón para iniciar el tratamiento. Los parámetros de CAVI y RF son predeterminados y pueden configurarse manualmente según la tolerancia individual.

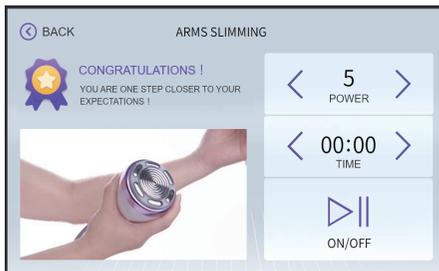


Quando veas esta interfaz habrás finalizado la operación.

1.3 ADELGAZAMIENTO DE CINTURA

Presione enter a la siguiente pagina.

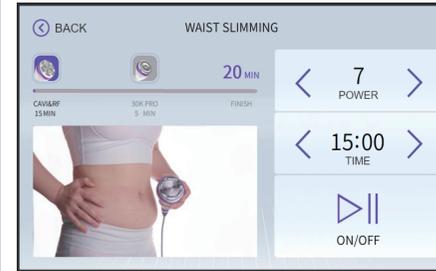


Haga clic en este botón para iniciar el tratamiento. Los parámetros de CAVI y RF son predeterminados y pueden configurarse manualmente según la tolerancia individual.

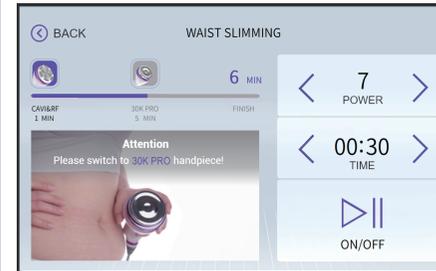

Quando aparezca esta interfaz, CAVI y RF dejarán de funcionar y se iniciará 30k Pro. Cambie el dispositivo a 30k Pro. El tiempo de respuesta es de 30 segundos. Al finalizar el tiempo de respuesta, cambiará automáticamente a la página de 30k Pro.



Haga clic en este ícono para ingresar a la interfaz de 30k Pro con anticipación y presione el botón de inicio para operarlo.

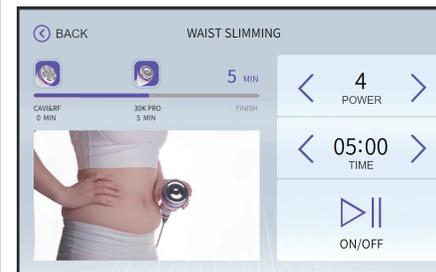

Los parámetros son predeterminados y se pueden ajustar manualmente según la tolerancia individual.

Cuando veas esta interfaz habrás finalizado la operación.

1.4 ADELGAZAMIENTO DE PIERNAS

Presione enter a la siguiente pagina.



Haga clic en este botón para iniciar el tratamiento. Los parámetros de CAVI y RF son predeterminados y pueden configurarse manualmente según la tolerancia individual.



Cuando aparezca esta interfaz, CAVI y RF dejarán de funcionar y se iniciará 30k Pro. Cambie la pieza de mano a 30k Pro. Tiempo de aviso: 30 segundos. Al finalizar el tiempo de aviso, cambiará automáticamente a la página de 30k Pro.

Haga clic en este ícono para ingresar a la interfaz de 30k Pro con anticipación y presione el botón de inicio para operarlo.

Los parámetros son predeterminados y se pueden ajustar manualmente según la tolerancia individual.

Cuando veas esta interfaz habrás finalizado la operación.

2. ESPECIALIZADO

Presione enter a la siguiente pagina.



Volver a la página anterior

2.1 EMS & EL | Presione enter a la siguiente pagina.



Visualización y configuración de la hora

Visualización y configuración del nivel de energía para EMS (rango de 0 a 10; se recomienda de 3 a 7)

Visualización y configuración del nivel de energía para EL (rango de 0 a 10; se recomienda de 3 a 7)

Encendido /Apagado Volver a la página anterior

2.2 RF y SUCCIÓN | Presione enter a la siguiente pagina.



Visualización y configuración de la hora

Visualización y configuración del nivel de energía para RF (el rango es de 0 a 10; se prefiere de 3 a 7)

Encendido /Apagado Volver a la página anterior

Visualización y configuración del tiempo de succión (el rango es de 0,0 a 2,0; se sugiere de 0,2 a 1,0)

Visualización y configuración del tiempo de liberación (el rango es de 0,0 a 2,0; se sugiere de 0,0 a 0,5)

Nota: Configure el tiempo de succión más largo que el tiempo de liberación. Cuando el tiempo de liberación se establece en cero, la succión es constante.

MODE	M1	M2	M3	M4	M5
Selección de modo de succión y liberación (no es necesario ajustar el tiempo de succión y liberación cuando selecciona entre los modos aquí)					
<i>M1:</i> succión constante					
<i>M2:</i> el intervalo más corto entre la succión y la liberación					
<i>M3:</i> intervalo más corto entre la succión y la liberación					
<i>M4:</i> intervalo corto entre la succión y la liberación					
<i>M5:</i> largo intervalo entre la succión y la liberación					

Encendido /Apagado Volver a la página anterior

Perilla para ajustar la succión (Gire hacia la derecha para aumentar la succión y hacia la izquierda para disminuirla).

2.3 CABLES Y RF | Presione enter a la siguiente pagina.



Visualización y configuración de la hora

Visualización y configuración del nivel de energía para CAVI (el rango es de 0 a 10; se prefiere de 5 a 8)

Visualización y configuración del nivel de energía para RF (el rango es de 0 a 10; se prefiere de 3 a 7)

Encendido /Apagado

Volver a la página anterior

Selección de modo para CAVI

M1: Trabajo continuo que se adapta a personas con exceso o acumulación de grasa espesa.

M2: El trabajo discontinuo se adapta a personas que quieran reducir o con grasa localizada.

2.4 30k Pro | Press enter the following page.



Visualización y configuración de la hora

Selección de modo

M1: Trabajo continuo que se adapta a personas con exceso o acumulación de grasa espesa.

M2: El trabajo discontinuo se adapta a personas que quieran reducir o con grasa localizada.

Visualización y configuración del nivel de energía (el rango es de 0 a 10; se prefiere de 5 a 8)

Encendido /Apagado

Volver a la página anterior

FAMILIAR

Reafirmación facial

Tiempo de funcionamiento: 40 minutos.

Eficacia:

1. Nutrición profunda de la piel, mejora su absorción e hidratación.
2. Aumenta la elasticidad y reafirma la piel.
3. Acelera la circulación sanguínea y el metabolismo.
4. Aclara el contorno facial y alivia la papada.
5. Estimula la producción de colágeno, aplana las estrías y reduce las arrugas.

Productos coincidentes: limpiador facial, gel, mascarillas, tónico, esencia, loción/crema facial

Procedimiento:

1. Limpie el rostro.
2. Aplique el gel uniformemente.
3. Apague el aparato, seleccione **DOMÉSTICO - Reafirmación Facial** y presione el botón de inicio.
4. **RF y SUCCIÓN (10 minutos)**

Nota: Los parámetros son predeterminados y puedes ajustar manualmente el nivel de energía, la succión y el tiempo de liberación.

- Ajuste el vacío según la tolerancia de la persona.
- Mueva el dispositivo hacia la parte posterior de la oreja, a lo largo de la mandíbula inferior, y deslícelo hacia el lado del cuello.
- Mueva el instrumento lentamente desde el mentón hasta la parte inferior de la oreja, desde la comisura de la boca hasta el oído medio, desde el ala superior de la oreja y desde la parte inferior del ojo hasta Taiyang (EX-HN5).
- Levante el dispositivo desde el arco superciliar hacia la línea del cabello.
- Haga lo mismo en el otro lado.



5.EMS & EL (10 minutos)

- Mueva el dispositivo lentamente hacia la parte posterior de la oreja, a lo largo de la mandíbula inferior; repita de 3 a 5 veces.
- Mueva el instrumento lentamente desde el mentón hasta la parte inferior de la oreja, la comisura de la boca hasta el oído medio, el ala superior de la oreja y la parte inferior del ojo hasta Taiyang (EX-HN5); repita de 3 a 5 veces.
- Levante el dispositivo desde el arco superciliar hacia la línea del cabello; repita de 3 a 5 veces.
- Haga lo mismo con el otro lado.

6. Limpia el rostro.

7. Aplica una mascarilla y espera de 10 a 15 minutos.

8. Retira la mascarilla y limpia el rostro.

9. Aplica tónico, esencia y loción o crema facial.



Curso de tratamiento recomendado:

Realice el tratamiento 1 o 2 veces por semana. La piel lucirá firme, hidratada y brillante después de un mes. Tras dos meses de tratamiento, la piel se vuelve suave y tersa, el contorno facial se acentúa y las arrugas se reducen. Los mejores resultados se obtienen después de tres meses: el rostro se reafirma, se reafirma y se vuelve más terso, y las arrugas y líneas de expresión se alivian.

Asuntos que requieren atención después del tratamiento:

- Lava tu rostro con agua tibia.
- Mantén tu piel hidratada y protégete del sol.
- No uses productos para el cuidado de la piel que contengan exfoliantes, AHA (alfahidroxiácidos), etc., durante tres días.
- Aplica una mascarilla tres veces por semana.

Adelgazamiento de brazos

Tiempo de funcionamiento: 20 minutos

Eficacia:

- Disuelve la grasa y reduce la apariencia de brazos flácidos y gruesos.
- Alivia la piel flácida o suave, reafirma la piel y aumenta su elasticidad.
- Acelera la circulación sanguínea y limpia los canales y colaterales.

Productos compatibles: gel

Procedimiento:

- Limpie los brazos con una toalla.
- Mida el tamaño de los brazos y regístrelo.
- Aplique el gel uniformemente sobre la zona a tratar.
- Apague la máquina, seleccione DOMÉSTICO - Adelgazamiento de Brazos y presione el botón de inicio.

5. CAVI y RF (20 minutos)

- Empuje el brazo inferior con el dispositivo; 2 minutos.

- b. Dibujar círculos pequeños en la zona grasa del antebrazo; 2 minutos.
- c. Empujar el brazo con la pieza de mano; 2 minutos.
- d. Dibujar círculos pequeños en el brazo; 4 minutos.
- e. Hacer lo mismo en el otro lado.

6.Limpiar las piezas tratadas.

Curso de tratamiento recomendado:

Realice el tratamiento al menos dos veces por semana. La circunferencia del brazo se reduce considerablemente, el exceso de grasa comienza a disminuir y la piel se reafirma después de un mes. Tras dos meses de tratamiento, el brazo se afina, su línea adquiere un aspecto atractivo y la piel se vuelve elástica. Se puede lograr un resultado más estable después de tres meses.

Asuntos que requieren atención después del tratamiento:

- 1. Evite comer y beber en exceso, traspasar o consumir alcohol.
- 2. Beba más agua tibia para facilitar el metabolismo (se recomienda beber de 250 a 300 ml de agua tibia inmediatamente después del tratamiento y la misma cantidad una hora después, todos los días).
- 3. Consuma menos aceite y sal; coma menos, pero con más frecuencia; evite los alimentos ricos en aceite y calorías; disminuya la ingesta de carbohidratos en cierta medida, pero aumente la de proteínas.
- 4. Puede lograr una mejor eliminación de grasa y adelgazamiento corporal con ejercicios de brazos.

Adelgazamiento de cintura

Tiempo de funcionamiento: 20 minutos

Eficacia:

- 1. Disuelve eficazmente la grasa y elimina la flacidez de la cintura y el abdomen.
- 2. Reafirma la piel, aumenta su elasticidad y alivia la flacidez y la piel suave.
- 3. Acelera el metabolismo, alivia el estreñimiento y mejora la función intestinal.
- 4. Reduce las estrías y la celulitis.

Productos compatibles: gel

Procedimiento:

- 1. Limpie la cintura y el abdomen con una toalla.**
- 2. Mida su tamaño.**
- 3. Aplique el gel uniformemente sobre la zona a tratar.**
- 4. Apague el aparato, seleccione DOMÉSTICO - Adelgazamiento de Cintura y presione el botón de inicio.**
- 5. CAVI y RF (15 minutos)**
 - a. Mueva el dispositivo desde la cintura hasta el ombligo; 3 minutos.
 - b. Haga lo mismo en el otro lado.
 - c. Dibuje círculos pequeños alrededor del ombligo; 3 minutos.
 - d. Dibuje círculos grandes alrededor del ombligo; 3 minutos.
 - e. Mueva la cintura hacia adelante y hacia atrás; 3 minutos.

6.30k Pro (5 minutos)

Circula sobre la celulitis durante 5 minutos.

7.Limpiar las piezas tratadas.

Curso de tratamiento recomendado:

Realice el tratamiento al menos dos veces por semana. La cintura se reduce después de cuatro semanas, la flacidez en cintura y abdomen disminuye, las estrías de distensión desaparecen gradualmente y la piel se reafirma. Tras dos meses de tratamiento, los resultados se duplican, el tracto intestinal se despeja y la cintura se define. Se puede obtener un resultado óptimo al finalizar el tratamiento de tres meses.

Asuntos que requieren atención después del tratamiento:

- 1. Evite comer y beber en exceso, traspasar o consumir alcohol.
- 2. Beba más agua tibia para facilitar el metabolismo (se recomienda beber de 250 a 300 ml de agua tibia inmediatamente después del tratamiento y la misma cantidad una hora después, todos los días).

3. Consuma menos aceite y sal; coma menos, pero con más frecuencia; evite los alimentos ricos en aceite y calorías; disminuya la ingesta de carbohidratos en cierta medida, pero aumente la de proteínas.
4. Se puede lograr una mejor eliminación de grasa con ejercicio adecuado.

Piernas adelgazantes

Tiempo de funcionamiento: 30 minutos

Eficacia:

1. Reafirma la piel y previene la flacidez.
2. Estimula la producción de colágeno y reduce las estrías.
3. Mejora la circulación en las piernas y elimina el edema.
4. Activa la circulación, elimina la estasis, desobstruye los canales sanguíneos y colaterales, y previene las varices.
5. Reafirma el exceso de grasa en las piernas y elimina los muslos gruesos.

Productos compatibles: gel

Procedimiento:

1. Limpie la pierna con una toalla.
2. Mida el tamaño de la parte inferior de la pierna y el muslo y regístrelo.
3. Aplique el gel uniformemente sobre la zona a tratar.
4. Apague el aparato, seleccione **DOMÉSTICO - Adelgazamiento de Piernas** y presione el botón de inicio.
5. **CAVI y RF (20 minutos)**
 - a. Dibujar círculos pequeños en la parte inferior de la pierna; 1 minuto.
 - b. Mover el cuerpo de un lado a otro entre la rodilla y la raíz del muslo; 2 minutos.
 - c. Dibujar círculos desde la rodilla hasta la raíz del muslo; 3 minutos.
 - d. Empujar en cruz y dibujar una línea tras otra desde la parte exterior del muslo hasta el centro; 2 minutos.
 - e. Empujar en cruz y dibujar una línea tras otra desde la parte interior del muslo hasta el centro; 2 minutos.
 - f. Hacer lo mismo con el otro lado.

6.30k Pro (10 minutos)

- a. Circule sobre la celulitis de la parte inferior de la pierna durante 2 minutos.
- b. Circule sobre la celulitis de la pierna durante 3 minutos.
- c. Haga lo mismo con la otra pierna.

7.Limpie las piezas tratadas.

Curso de tratamiento recomendado:

Tómelo al menos dos veces por semana. El tamaño de la pierna se reducirá después de cuatro semanas, las estrías de distensión desaparecerán gradualmente y la piel se tensará visiblemente. Después de dos meses, el tejido areolar de la pierna se aliviará y se volverá más delgado y firme. La pierna se volverá más esbelta y firme después de tres meses de tratamiento.

Asuntos que requieren atención después del tratamiento:

1. Evite comer y beber en exceso, trasnchar o consumir alcohol.
2. Beba más agua tibia para facilitar el metabolismo (se recomienda beber de 250 a 300 ml de agua tibia inmediatamente después del tratamiento y la misma cantidad una hora después, todos los días).
3. Consuma menos aceite y sal; coma menos, pero con más frecuencia; evite los alimentos ricos en aceite y calorías; disminuya la ingesta de carbohidratos en cierta medida, pero aumente la de proteínas.