


Manual de usuario

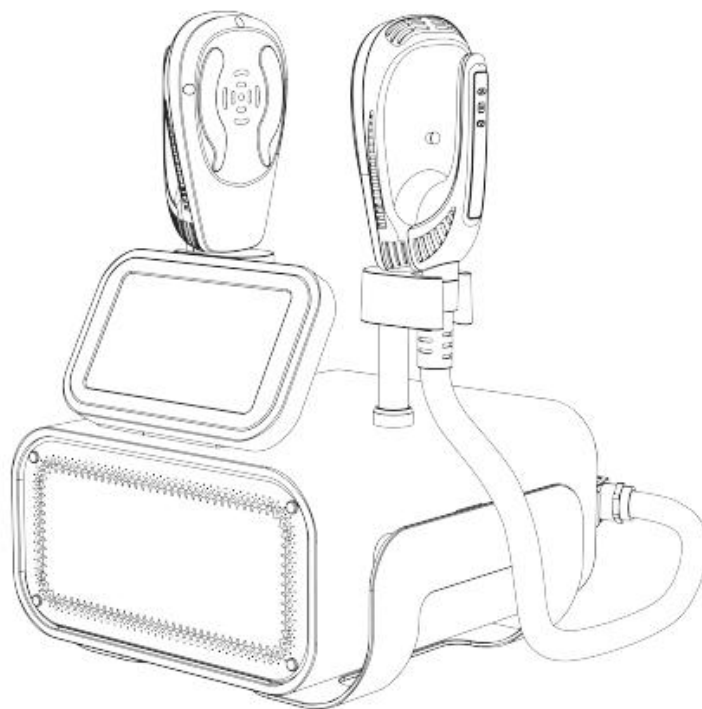

Prólogo

Estimado usuario:

Le agradecemos que haya elegido nuestro nuevo producto de modelado corporal, Magiccurve. Se trata de un aparato profesional de modelado corporal que debe ser manejado y utilizado correctamente por personal debidamente formado. Si no se utiliza correctamente, este aparato podría tener consecuencias negativas para la salud. Lea atentamente este manual antes de utilizarlo y siga estrictamente las instrucciones que en él se indican.

¡Gracias!

1.Descripción general

MagicCurve es el aparato de fitness más popular para el desarrollo muscular y el modelado corporal, capaz de sustituir todos los tratamientos de musculación y modelado corporal de los salones de belleza; gracias a su fácil manejo, ofrece soluciones de modelado corporal a los usuarios que desean adelgazar. MagicCurve promueve la expansión y contracción continuas de los músculos corporales mediante la estimulación de los nervios, completando así el entrenamiento ultrapasivo de los músculos, lo que permite una remodelación profunda de los mismos, el crecimiento de fibras miogénicas (aumento muscular), la generación de nuevas cadenas de colágeno y fibras musculares (hiperplasia muscular), entrenando y aumentando así la densidad y el volumen muscular. Este aparato es seguro y eficaz, sin efectos secundarios.

2. Precauciones

1. Este aparato está cubierto por la garantía del servicio técnico designado.
2. Utilice este producto a temperaturas ambiente comprendidas entre 16 °C y 35 °C; no coloque el aparato en un entorno con temperaturas elevadas, ya que esto podría afectar a su vida útil y a su funcionamiento normal.
3. Limpie el instrumento después de cada uso y guárdelo adecuadamente para prolongar su vida útil; no utilice alcohol ni productos que contengan alcohol para limpiarlo.
4. Utilice siempre los accesorios específicos suministrados o recomendados por el fabricante original para garantizar el buen funcionamiento del instrumento y prolongar su vida útil.
5. No utilice el aparato en los ojos, la cabeza, el pecho, la espalda, la glándula tiroides, las glándulas paratiroides, los testículos, el abdomen de las mujeres embarazadas ni en personas con marcapasos.
6. Quítese todos los objetos metálicos que lleve encima para evitar situaciones imprevistas o que puedan afectar al tratamiento antes de comenzar.
7. Apague el aparato cuando no lo utilice y asegúrese de desconectarlo de la red eléctrica antes de marcharse al finalizar la jornada, para garantizar la seguridad del aparato.
8. No debe utilizarse durante los seis meses posteriores a una intervención quirúrgica o una cesárea, durante los tres meses posteriores a un aborto espontáneo, durante los dos meses posteriores a un parto normal, ni en mujeres que estén menstruando, embarazadas o en periodo de lactancia.
9. No utilice el aparato con el estómago lleno; realice el tratamiento una hora después de la comida.
10. Asegúrese de que tanto la zona de tratamiento como el mango estén secos durante el funcionamiento.
11. No utilice el aparato en una misma persona más de 1,5 horas al día en general, ni más de 1 hora en la misma zona.

3. Contraindicaciones

Consulte a un médico o a un profesional antes de utilizar el aparato. Los detalles son los siguientes:

1. Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
2. Personas con enfermedades cardíacas o que lleven marcapasos.
3. Personas con heridas que no hayan cicatrizado y que se estén recuperando de una operación.
4. Personas con epilepsia, diabetes grave e hipertiroidismo.
5. Personas con tumores malignos, hemofilia o hemorragias graves.
6. Personas con enfermedades cutáneas y enfermedades infecciosas.
7. Utilizar con precaución en personas alérgicas a la corriente eléctrica
8. Las personas que se hayan sometido a una cesárea en los últimos seis meses, a un aborto en los últimos tres meses o a un parto natural en los últimos dos meses no pueden utilizar este aparato.

9.No utilizar cerca de implantes corporales, como los de metal, plástico, silicona, etc.

4.Parámetros técnicos

Número de producto: WL-EMT97

Alimentación: CA 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo en modo de espera: 50 W

Potencia máxima de salida: 500 W

Potencia del micromotor: 0,2 W

Inducción magnética: 6 teslas

tamaño de la pantalla: 10,1 pulgadas

orma de onda: forma de onda bifásica

Dimensiones de la unidad principal: 450 × 450 × 420 mm (largo × ancho × alto)


Dimensiones de la máquina completa (incluidas las estanterías y las piezas de mano): 570 × 450 × 640 mm (largo × ancho × alto)

Dimensiones del embalaje: 600 × 630 × 500 mm (largo × ancho × alto)

Peso neto (sin embalaje): 26,5 kg


Peso bruto: 42 kg

5.Lista de embalaje

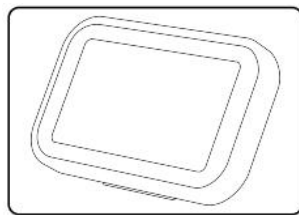


1

10,1 pulgadas
pantalla * 1

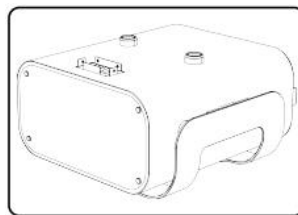


2

Unidad principal*1

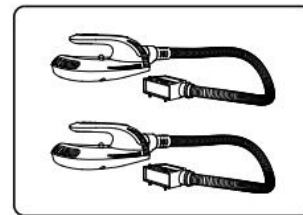


3

MagicCurve
handle * 2

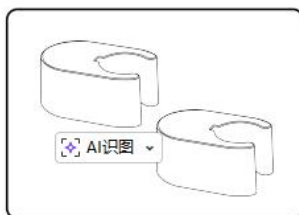


4

Asa de plástico
soporte * 2

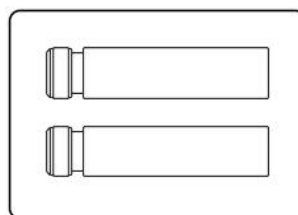


5

Soporte
metálico*2

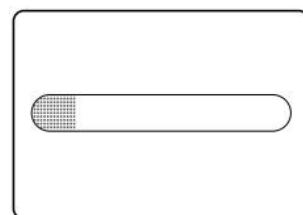

6

Correa * 1 juego

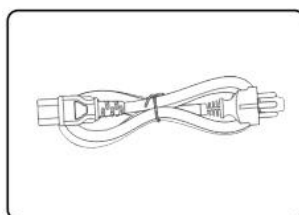


7

Cable de alimentación*1

Nota: compruebe el instrumento y sus accesorios o complementos antes de utilizarlo, y retire todo el material de embalaje una vez que haya comprobado que está completo.

6.Introducción al uso

1.Pasos de instalación

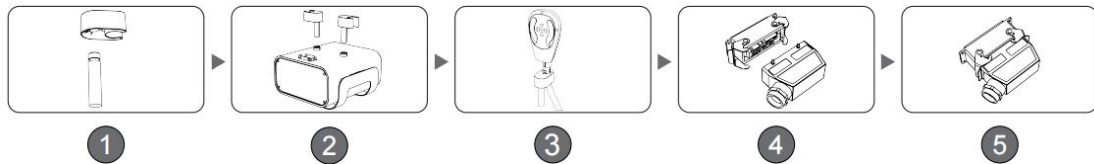


Paso 1: Monta el soporte del mango.

Paso 2: Fija los dos soportes montados a la unidad principal.

Paso 3: Coloca las asas en los soportes.

Paso 4: Inserta el tapón de aviación.

Paso 5: Fija el tapón con los pasadores.

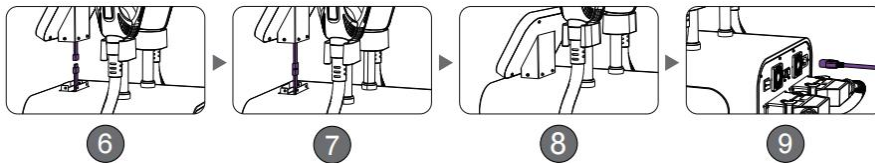

Paso 6: Conecta la pantalla y la unidad principal con el cable plano.

Paso 7: Monta la pantalla y la unidad principal.

Paso 8: Fíjalo con los tornillos.

Paso 9: Conecta la alimentación, inicia la aplicación.

Cómo cambiar el fusible:



2.Introducción a la interfaz




La pantalla de bienvenida aparece tras conectar la alimentación


Modo automático (EMT y el sistema eléctrico funcionan al mismo tiempo)

Modo manual (solo funciona EMT)

2.1. Configuración del funcionamiento automático

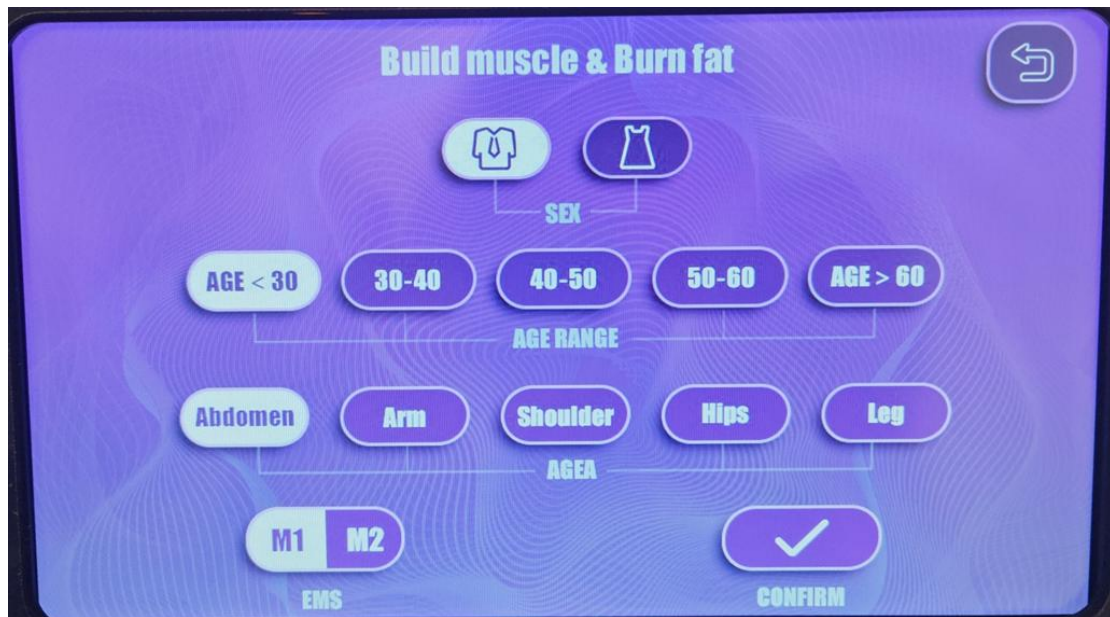

establecer el sexo del usuario

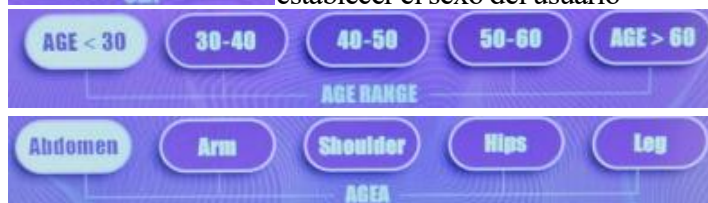

establecer la edad del usuario

Selecciona la zona de



Selección de modo

M1: El EMS y el campo magnético EMT funcionan simultáneamente


M2: El EMS y el campo magnético EMT funcionan de forma alterna



Volver a la interfaz anterior



Confirmar

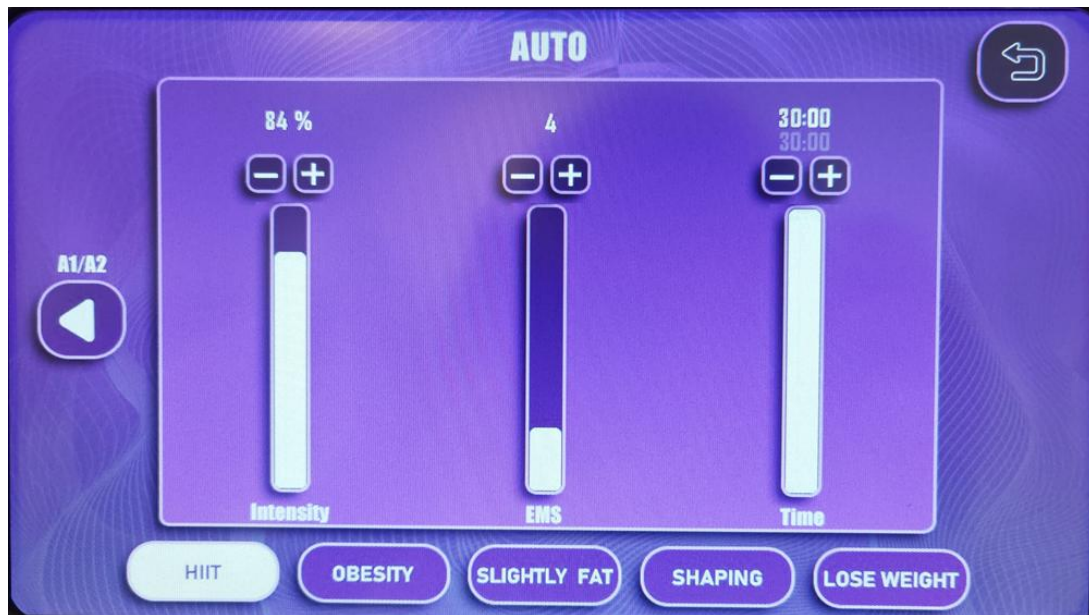


Botón de visualización y ajuste de la hora



Aumentar el tiempo



Reducir el tiempo

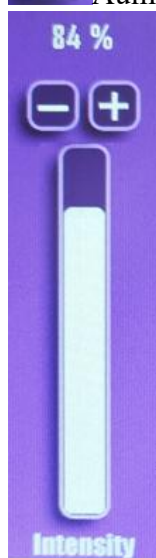


Botones de visualización y ajuste de la intensidad magnética EMT



Aumentar la intensidad



Reducir la intensidad

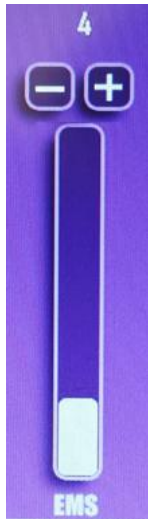


Botones de visualización y ajuste de la energía EMS




Aumentar la energía




Reducir el consumo de energía

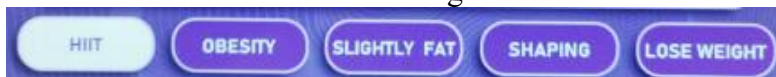

Selección de modos:

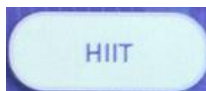

Entrenamiento básico para principiantes

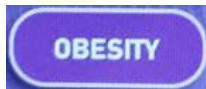

Entrenamiento adaptado



Entrenamiento para principiantes



Entrenamiento avanzado



Entrenamiento profesional



Las manijas
A1 y A2 están
desconectadas



El usuario
A1 está
conectado



El usuario
A2 está
conectado



Los mangos
A1 y A2
están
disponibles



Botón de
inicio/parada



Volver

2.2 Interfaz de funcionamiento manual



Haz clic aquí para ajustar la duración de F1, F2 y F3.



Haz clic aquí para ajustar la frecuencia de F1, F2 y F3.



Aumentar



reducir

¿Cómo configurar tu propio tratamiento?

1. Pulsa en «Manual» para acceder a la interfaz de configuración personalizada.
2. Ajusta la potencia, el tiempo y la frecuencia.
3. Puede configurar 3 modos de funcionamiento independientes en «F1, F2, F3,»; el aparato funcionará en el orden de «F1, F2, F3» según el ciclo de programa establecido hasta que finalice el tiempo total de tratamiento.

Por ejemplo:

1. Ajuste el tiempo, la intensidad y el EMS.
2. Durante el tratamiento, el aparato funcionará con los parámetros que haya ajustado.
3. El sistema funcionará según los parámetros configurados para F1 (60 Hz); una vez finalizado el tiempo de funcionamiento de F1, el sistema funcionará según los parámetros configurados para F2 (3 Hz); una vez finalizado el tiempo de funcionamiento de F2, el sistema funcionará según los parámetros configurados para F3 (115 Hz).
4. Una vez finalizado el tiempo de funcionamiento de F3, el aparato seguirá funcionando en el orden F1, F2, F3 hasta alcanzar los 30 minutos de tratamiento.



Botones de visualización y ajuste de la intensidad del EMT



Aumentar la intensidad



Reducir la intensidad



Botón de visualización y ajuste de la hora



Aumentar el tiempo



Reducir el tiempo



Botones de visualización y ajuste de la energía EMS



Aumentar la energía



Reducir el consumo de energía




Selección de modo

M1: El EMS y el campo magnético EMT funcionan simultáneamente


M2: El EMS y el campo magnético EMT funcionan de forma alterna



Funciona sin
conexión

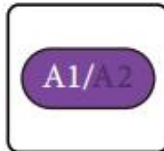

Gestionar
A1 en línea

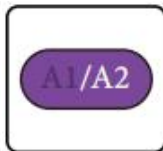

Gestionar
A2 en línea



A1 y A2 se
gestionan
en línea.



Botón de
inicio/parada




Volver

Interfaz de alertas



El voltaje es demasiado bajo

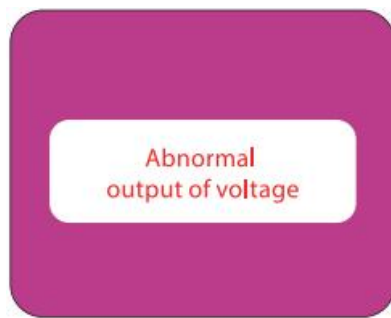

Salida de tensión anómala



La temperatura del mango es demasiado alta.



Tensión demasiado alta

7. Solución de problemas

1. ¿El aparato no se enciende?

A. Compruebe que el cable de alimentación esté conectado a una toma de corriente que funcione correctamente.

B. Compruebe si el fusible está suelto o fundido; el fusible se encuentra entre las rejillas de ventilación (consulte el procedimiento de sustitución del fusible en la sección de instalación).

C. Si los métodos anteriores no funcionan, póngase en contacto con el distribuidor para que le ayude.

2. ¿El aparato no emite energía?

A. Compruebe que el mango esté bien conectado a la unidad principal.

B. Compruebe que la zona de tratamiento esté limpia; la grasa o los aceites pueden provocar un mal contacto entre el cabezal de tratamiento y el cuerpo, lo que impediría la emisión de energía.

3. ¿El aparato se ha encendido correctamente, pero ha aparecido un mensaje de error en la pantalla?

A. Desenchufe el cable de alimentación, espere un minuto y vuelva a enchufarlo para reiniciar el aparato.

B. Si el método anterior no funciona, póngase en contacto con el distribuidor para que le ayude.

4. ¿Aparece en pantalla el mensaje de error «voltaje demasiado bajo»?

A. Intente reiniciar el instrumento; si el mensaje sigue apareciendo, póngase en contacto con el distribuidor para que le ayude.

5. ¿Aparece en pantalla la alerta «Salida de tensión anómala»?

A. Intente reiniciar el aparato; si la alerta persiste, póngase en contacto con el distribuidor para obtener ayuda.

6. ¿Aparece en pantalla la alerta «¡La temperatura del mango es demasiado alta!»?

A. Apague el aparato y espere 20 minutos a que se enfríe el mango antes de volver a utilizarlo.

B. Si la alerta vuelve a aparecer en 30 minutos, póngase en contacto con el distribuidor para que le ayude.

7. ¿Aparece en pantalla la alerta «Voltaje demasiado alto»?

A. Póngase en contacto con el distribuidor para que le ayude.

8. Preguntas frecuentes

1. ¿En qué partes del cuerpo se puede aplicar el tratamiento?

Respuesta: abdomen, glúteos, brazos y piernas.

2. ¿Cuánto dura el tratamiento?

Respuesta: no es necesario realizar una operación manual prolongada; basta con ponerlo en modo automático, seleccionar la zona de tratamiento, fijar el mango en la zona de tratamiento con la correa; cada sesión dura 30 minutos.

3. ¿Tengo que seguir una dieta saludable después del tratamiento?

Respuesta: No es necesario que cambies tu dieta de forma específica, pero sería beneficioso para el metabolismo que te mantuvieras hidratado y evitaras comer en exceso, así como las comidas picantes y grasientas.

4. ¿Sentiré dolor durante el tratamiento?

Respuesta: Sin dolor, sin intervenciones invasivas, sin anestesia; te sentirás como si estuvieras realizando ejercicio intenso.

5. ¿Cuál es el efecto principal del tratamiento?

Respuesta: tonifica el cuerpo, desarrolla la musculatura y define el contorno corporal.

6. ¿Puedo realizar el tratamiento en casa?

Respuesta: Sí, el modo «Auto» está pensado para uso doméstico.

9. Introducción al tratamiento

1. Tonificación y modelado de los músculos abdominales

1. Eficacia

- (1) Tonifica la cintura y el abdomen para conseguir unos abdominales planos y firmes.
- (2) Desarrollo y modelado muscular, entrenamiento de los músculos abdominales para conseguir un contorno definido y unos abdominales firmes.
- (3) Aumenta la elasticidad de la piel, reafirma la piel y mejora las estrías.
- (4) Reafirma la piel y mejora la flacidez de la piel en el abdomen y la cintura.
- (5) Acelera el metabolismo y mejora el estreñimiento y el tránsito intestinal.

2. Indicaciones


- (1) Personas con un contorno abdominal y de cintura poco favorecedor.
- (2) Personas que sufren estrías y flacidez cutánea tras el parto.
- (3) Personas con una línea de cintura poco favorecedora debido a un estilo de vida sedentario.
- (4) Personas con estreñimiento y molestias abdominales.
- (5) Personas que desean ganar masa muscular, moldear el cuerpo y tonificar los abdominales.

3. Pasos (45 minutos)


Preparación: aceite de masaje, toalla caliente, correa.




1. Limpia el abdomen (mejor con una toalla caliente).

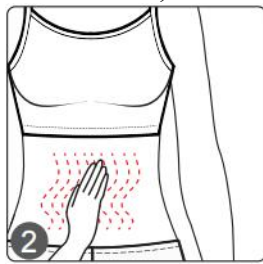


2. Masajea con aceite de masaje para relajar la cintura y el abdomen (15 minutos).

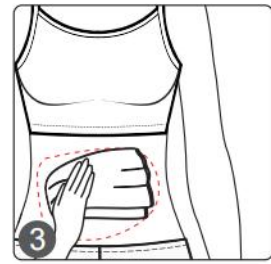


3. Limpia la zona de masaje.

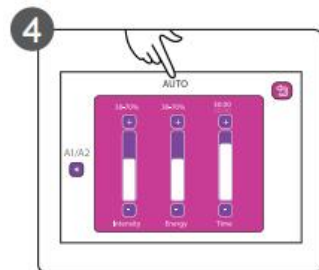


(1) Configuración de parámetros: seleccione el modo automático, indique el sexo, la edad y la altura del usuario, así como la zona de tratamiento; parámetros recomendados: Intensidad A: 30-70 %, Intensidad de energía A: 5-15, Duración: 30 minutos; si es la primera vez que utiliza el aparato, comience siempre por el nivel más bajo hasta que se acostumbre.

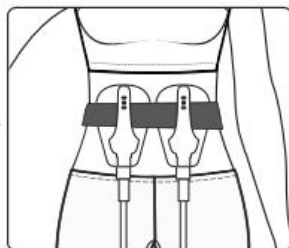

(2) Fija el asa a la zona de tratamiento con la correa.

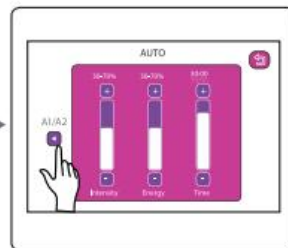

(3) Pulsa el botón Inicio.

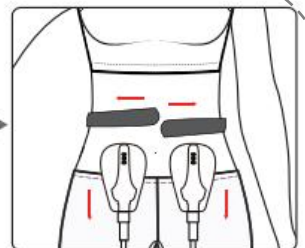

(4) Al finalizar la sesión, retira el asa y desata las correas.

4. Sesión de ejercicios (desarrollo muscular y modelado corporal, tonificación de los abdominales) (30 minutos).

2. Desarrollo y tonificación de los músculos de los brazos

1. Eficacia

- (1) Tonifica la parte superior de los brazos, lo que da como resultado un contorno definido de los brazos.
- (2) Reafirma la piel, mejora su elasticidad y reduce la flacidez.
- (3) Acelera la circulación sanguínea.
- (4) Desarrolla y moldea los músculos, definiendo el contorno corporal.

2. Indicaciones


- (1) Personas que desean mejorar el aspecto de sus brazos.
- (2) Personas con piel flácida en los brazos.
- (3) Personas con dolor y entumecimiento en los músculos de los brazos.
- (4) Personas que desean mejorar la silueta de su cuerpo.

3. Pasos (45 minutos)


Preparación: aceite de masaje, toalla caliente, correa.




1. Lávate los brazos (mejor con una toalla caliente).

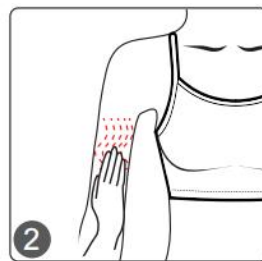


2. Masaje con aceite de masaje para relajar los brazos (15 minutos).

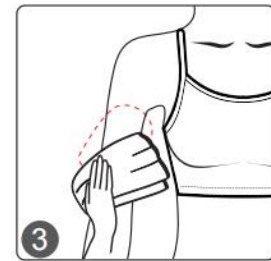


3. Limpia la zona de masaje.

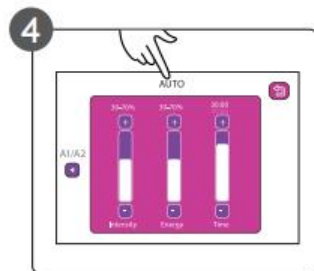


(1) Configuración de parámetros: seleccione el modo «Auto», indique el sexo, la edad y la estatura del usuario, así como la zona de tratamiento; parámetros recomendados: Intensidad A: 30-70 %, intensidad de energía A: 5-15, tiempo: 30 minutos; si es la primera vez que utiliza el dispositivo, comience siempre por el nivel más bajo hasta que se acostumbre.

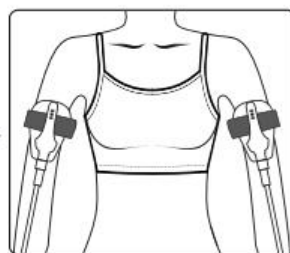

(2) Fija el asa a la zona de tratamiento con la correa.

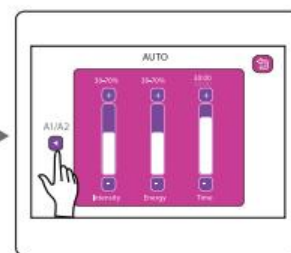

(3) Pulsa el botón Inicio.

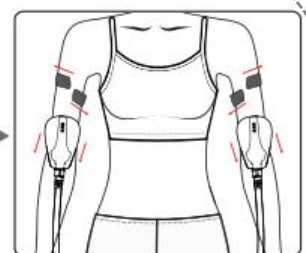

(4) Al finalizar la sesión, retira el asa y desata las correas.

4. Tratamiento con aplicador (aumento de la masa muscular) (60 minutos, 30 minutos por cada lado).

3. Desarrollo y modelado de los glúteos

1. Eficacia

- (1) Relaja los músculos, previene la atrofia muscular y alivia los espasmos musculares.
- (2) Alivia la flacidez provocada por la relajación muscular.
- (3) Mejora la flacidez de los glúteos, reafirma la piel y aumenta la elasticidad de los glúteos.
- (4) Tonifica y reafirma los glúteos, definiendo su curva.
- (5) Activa la regeneración del colágeno del tejido muscular del suelo pélvico inferior, tensa los músculos del suelo pélvico relajados, resuelve el problema de la pérdida de orina y la incontinencia, y consigue indirectamente un efecto de estrechamiento vaginal.

2. Indicaciones

- (1) Personas con glúteos hundidos, planos y flácidos.
- (2) Personas con glúteos planos y sin forma.
- (3) Personas que desean mejorar la forma de su cuerpo.
- (4) Personas con exceso de grasa en los glúteos.
- (5) Personas con niveles reducidos de estrógenos y una vida sexual insatisfactoria.

3. Pasos (45 minutos)


Preparación: aceite de masaje, toalla caliente, correa.




1. Lávate las nalgas (mejor con una toalla caliente).




2. Masajea con aceite de masaje para relajar los glúteos (15 minutos).

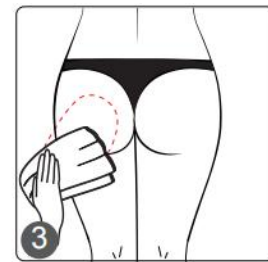


3. Limpia la zona de masaje.

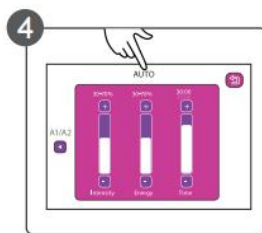


(1) Configuración de parámetros: seleccione el modo «Auto», indique el sexo, la edad y la altura del usuario, así como la zona de tratamiento; parámetros recomendados: Intensidad A: 30-70 %, intensidad de energía A: 5-15, tiempo: 30 minutos; si es la primera vez que utiliza el dispositivo, comience siempre por el nivel más bajo hasta que se acostumbre.

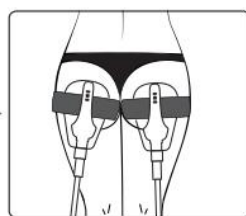

(2) Fija el asa a la zona de tratamiento con la correa.

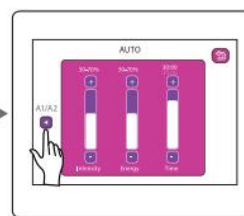

(3) Pulsa el botón Inicio.

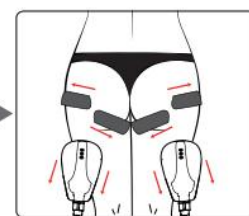

(4) Al finalizar la sesión, retira el asa y desata las correas.

4. Tratamiento manual (reafirmación y modelado de los glúteos, tonificación de los músculos pélvicos) (30 minutos por cada lado).

4.Desarrollo y tonificación de los músculos de las piernas

1. Eficacia

- (1) Reafirma la piel y previene la flacidez.
- (2) Estimula la regeneración del colágeno y suaviza las estrías.
- (3) Mejora la circulación en las piernas y reduce el edema.
- (4) Mejora el aspecto general de las piernas.

2. Indications

- (1) People with poor circulation, edema in the lower body.
- (2) People with rough and saggy skin on legs.
- (3) People with a bad leg curve.
- (4) People seeking an improved appearance of body.

3. Pasos (80 minutos)


Preparación: aceite de masaje, toalla caliente, correa.




1. Límpiase las piernas (mejor con una toalla caliente).




2. Masaje con aceite de masaje para relajar las piernas (20 minutos).

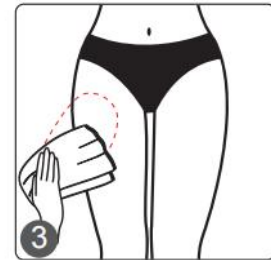


3. Limpia la zona de masaje.

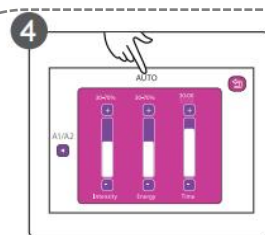


(1) Configuración de parámetros: seleccione el modo «Auto», indique el sexo, la edad y la altura del usuario, así como la zona de tratamiento; parámetros recomendados: Intensidad A: 30-70 %, intensidad de energía A: 5-15, tiempo: 30 minutos; si es la primera vez que utiliza el dispositivo, comience siempre por el nivel más bajo hasta que se acostumbre.

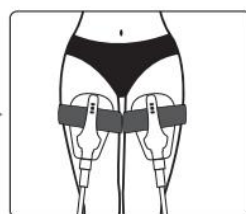

(2) Fija el asa a la zona de tratamiento con la correa.

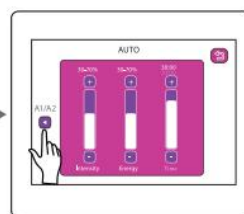

(3) Pulsa el botón Inicio.

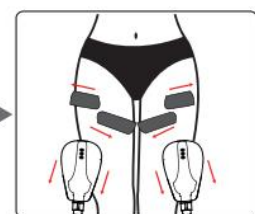

(4) Al finalizar la sesión, retira el asa y desata las correas.

4. Tratamiento corporal (modelado corporal)
(30 minutos por cada lado: izquierdo y derecho).

10.Frecuencia recomendada de los tratamientos

Un ciclo de tratamiento consta de 4 sesiones. Se recomienda realizar 2 sesiones por semana, con una duración de 45 minutos por zona tratada en cada sesión. Tras completar 1 o 2 ciclos, empezará a notar efectos visibles. Por lo general, los resultados óptimos se consiguen tras 6-8 ciclos. A partir de ahí, se debe programar un ciclo de mantenimiento cada 2-3 meses para mantener los resultados obtenidos.

11.After treatment

- (1) Evita comer en exceso, trasechar y beber alcohol.
- (2) Bebe mucha agua tibia para estimular el metabolismo (bebe entre 250 y 300 ml justo después del tratamiento y otros 250-300 ml una hora después; asegúrate de beber entre 250 y 3000 ml al día).
- (3) Siga una dieta baja en grasas y sal, haga más comidas pero consuma menos cantidad en cada una, evite los alimentos ricos en calorías, reduzca la ingesta de carbohidratos y aumente la ingesta de proteínas.

12.Garantía y servicio posventa

Garantía de un año a partir de la fecha de compra.

Nombre del producto: Magic Curve

Modelo del producto: WL-EMT97

Fecha de fabricación:

Control de calidad:

