

海菲大气泡

VY-8051



USER MANUAL

焕颜新生

让时光逆转的抗衰神器
Respect texture mark, Freezing young skin, Return your confidence

紧致肌肤提升面部轮廓

肌肤清理

淋巴排毒

补水修复

光子嫩肤

淡化细纹

营养导入

操作对比

焕颜新生, 冻结肌龄, 共享好莱坞明星美丽肌密

 BEFORE AFTER	 BEFORE AFTER
 BEFORE AFTER	 BEFORE AFTER
 BEFORE AFTER	 BEFORE AFTER

工作原理

WORKING PRINCIPLE

9合一大气泡针对女性的皮肤问题进行研发出此款焕颜新生疗程, 主要针对女性因环境问题导致的皮肤吸收功能障碍, 水油不平衡而导致的毛孔堵塞、皮肤氧化暗黄, 干燥粗糙等皮肤问题, 可快速帮助打通皮肤通道、补水、净化肌肤, 改善粗糙肤质, 细嫩肌肤的同时加强皮肤吸收功能, 净化毛孔、活化细胞、细嫩肌肤, 促进皮肤新陈代谢, 改善皮肤水油不平衡的状态。

使用说明

DIRECTIONS FOR USE

使用操作



01

配件

ACCESSORIES

配件清单					
产品	名称	数量	产品	名称	数量
	主机	1台		保险丝	2根
	电源线	1条		氢氧吸笔	1个
	微电BIO	1个		光子灯	2个
	眼部超声波	1个		面部超声波	1个
	钻石微雕	1组		喷雾枪	1个
	真空笔	1组		高周波	1个
	铲皮刀	1个		说明书	1本

收货方在收货时请按配件清单上的品种、类型进行对应检验收货! 逾期反馈责任自负!

(图5)

1、电子灯	2、电子灯	3、BIO
4、钻石微雕	5、喷雾枪	6、脸部超声波
7、眼部超声波	8、铲皮刀	9、高周波
10、氢氧气泡笔	11、能量调节	12、负压调节
13、水压调节	14、电源开关	15、显示屏
16、气泵滤油瓶	17、集废水瓶	18、散热口
19、提升模式	20、保湿模式	21、清洁模式
22、开关		

02

注意事项

PAY ATTENTION TO ITEM

操作禁忌事项

- 使用该电器设备时, 一定要遵守包括下列项目在内在基本预防措施。
使用该仪器前, 须阅读全部说明。
- 当插头插在插座上时, 绝对勿丢下本机不管。不使用时一定要拔掉本仪器的电源插头。
 - 只能将本仪器用于本说明书中阐明的用途。
 - 勿使用制造商所推荐以外的任何辅助装置。
 - 儿童不宜使用本仪器, 请让儿童远离本仪器。
 - 如果电源线或插头已损坏, 则绝对勿使用本仪器。如本仪器工作不正常、已掉落或损坏、已落入水中, 请将其送到指定的维修点。
 - 让电源线远离热源表面。勿拉扯电源线来移动本仪器。小心勿让插头接触针头、垃圾或湿气。
 - 勿在加热设备, 如加热地毯等的上面使用操作本仪器。
 - 勿在浴室或其他潮湿的地方使用本仪器, 否则可能会导致触电或本仪器功能失常。
 - 勿将水等洒落在操作触摸屏上。勿使用尖锐器物点击、敲击触摸屏。
 - 当拔出本仪器插头时应先停止仪器工作, 关闭仪器电源开关, 从电源插座上拔掉插头。
 - 只能将本仪器连接到合适的接地插座。
 - 请勿擅自打开或分解本仪器部件, 以免引起触电或人员伤害。
 - 皮肤有伤口者避开伤口操作;
 - 有严重心脏病, 重大手术、特性手术、怀孕、体内有金属物质禁用;
 - 操作之前, 必须将顾客与美容师身上的所有金属物品取下。


产品保养

PRODUCT KEEPER

- 小心搬动仪器; 亚克力机箱及有机玻璃面板不能用酒精擦拭; 包装纸箱要保留三个月以上;
- 仪器放置平稳、干燥的地方, 推动仪器时必须握住提手, 将配件安置在配件架内, 避免配件排地造成配件失灵, 导致仪器不能正常工作;
- 仪器使用完毕后, 一定要将配件清洁消毒;
- 一定要将配件探头上残留的护肤品擦拭干净, 避免产品回流进入主机, 造成仪器损坏, 配件被氧化现象。

界面操作

主界面如下图: (使用前请先设置治疗时间)

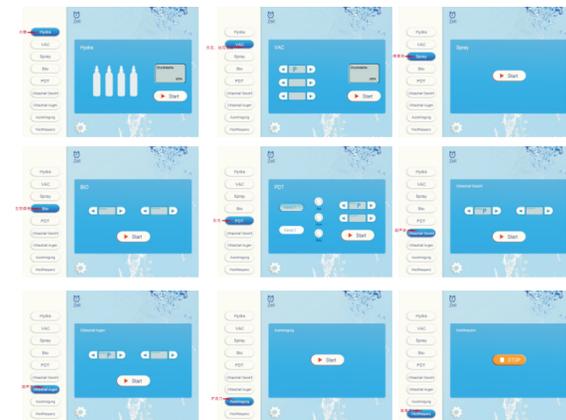

- 点击水雕, 选择HYDRA治疗, 4瓶灌装不同的溶液, 请选择您想要使用的瓶子, 并调整您想要的气压, 然后选择开始按钮, 开始工作, 调节旋转的负压和水位。
治疗:
① 清洁目标治疗区域并使其干燥;
② 将适量的液体产品注入选定的液体瓶中, 相应的设定时间和工作压力, 点击“开始治疗”“停止治疗”;
③ 美容师握住真空磨皮手柄, 在皮肤上来回移动, 手指随之移动;
④ 治疗时间结束后, 机器会自动暂停。
- 钻石磨皮和真空笔, 将管连接到机器的过滤器背面, 触摸VAC, 调整适当的压力, 然后单击开始除黑头处理。
- 选择SPRAY并触摸START开始喷涂处理;
- 生物微电流, 单击BIO, 然后调整模式和强度, 单击开始, 开始面部提升治疗。
- PDT, 调整能量, 调整模式, 选择正确的通道, 然后触摸START开始PDT治疗;
- 超声波(面部和眼睛), 点击超声波(面部)或超声波(眼睛), 然后调整模式和强度, 单击开始;
- 铲皮刀, 单击铲皮刀, 然后单击START, 根据客户承受力调节能量;
- 高周波, 顺时针旋转高周波开关, 然后在屏幕上选择高周波功能, 单击开始。

03

保修卡

产品名称: 海菲大气泡	型号: VY-8051
生产日期: _____	出厂编号: _____

- 本机器自购买日起 (凭发票) 7天内出现质量问题且外表完好可换新机一台, 主机电子核心部分保修一年 (不包括电机部分), 其他非保修范围或已过保修期限的, 亦可负责维修和更新, 需适当收取维修费用, 若仪器发生故障需回维修, 自购买日起半年内买方承担寄回运费、卖方承担寄出费用, 超过半年运费全部由买方承担。
- 对以下使用者个人原因造成的故障, 不提供免费保修服务:
 - ① 擅自拆装、改装本产品造成的故障;
 - ② 使用不慎摔打、跌落而造成的故障;
 - ③ 因缺乏合理保养而造成的故障;
 - ④ 没有按使用说明书的正确指导而造成的故障;

顾客姓名: _____	购买日期: _____
地址: _____	
联系电话: _____	
经销商名称: _____	联系人姓名: _____
地址: _____	
联系电话: _____	
保修记录: 维修日期: _____ 故障原因: _____ 处理方法与结果: _____	维修日期: _____ 故障原因: _____ 处理方法与结果: _____
保修记录: 维修日期: _____ 故障原因: _____ 处理方法与结果: _____	维修日期: _____ 故障原因: _____ 处理方法与结果: _____
保修记录: 维修日期: _____ 故障原因: _____ 处理方法与结果: _____	维修日期: _____ 故障原因: _____ 处理方法与结果: _____