

Manual de usuario

WL-7008C



Prefacio

To our valued users,

Thanks for choosing our latest 2-in-1 integrated beauty equipment. This newest weight reduction and body slimming instrument applies refrigeration techniques. WL-7008C is professional beauty equipment, which needs to be operated by people with professional training. Any improper use of this equipment may bring adverse consequences to the body. Thus, we advise all people to read this manual thoroughly and strictly follow the instructions specified before operation.

We believe our quality product will give you a good return and our perfect after-sales service will make you worry-free.

Thank you.

Tabla de contenido

Prefacio
Parte I
Introducción
Ventajas
Principio
Eficacia
Indicaciones
Contraindicaciones
Asuntos que requieren atención después del tratamiento
Parte II
Operaciones detalladas
Parámetros técnicos
Contraindicaciones
Precauciones de uso
Problemas comunes y soluciones
Preguntas frecuentes
Lista de embalaje
Diagramas operativos

Parte I

1. Introducción

La máquina de criolipólisis es actualmente el equipo más popular para la pérdida de peso y el adelgazamiento corporal. Puede reemplazar de manera efectiva varios programas de reducción de peso en un salón de belleza, operar de manera fácil, conveniente y rápida, y resolver los problemas corporales de las personas que buscan la belleza. Además, este equipo funciona de manera segura y efectiva y no requiere inyecciones, medicamentos ni cirugía. No tiene efectos secundarios, pero tiene un impacto inmediato. Y se opera externamente en todo momento. La criolipólisis (congelación de grasa) es un procedimiento de reducción de grasa no invasivo. Se enfoca en las células grasas de partes específicas del cuerpo y las elimina, disminuye el grosor de la grasa y hace que las curvas corporales sean más evidentes.

2. Ventajas

- (1) No requiere ninguna operación y no utiliza anestesia para llevar a cabo el procedimiento.
- (2) No se producirán irregularidades.
- (3) No habrá sangrado ni hinchazón.
- (4) Tiene un efecto evidente y el resultado no es fácil de recuperar.
- (5) No es invasivo y no causa lesiones y no afectará el trabajo ni la vida habitual de las personas después del tratamiento.
- (6) Elimina eficazmente la celulitis y el edema y disuelve la grasa.
- (7) Transfiere la grasa y tensa firmemente la piel.
- (8) Elimina el tejido celular profundo y la obesidad.
- (9) Disuelve y elimina la grasa y esculpe la curva perfecta.
- (10) No causa daños a los nervios, vasos sanguíneos o tejido de la superficie de la piel mientras elimina la grasa.
- (11) Adopta la última tecnología de congelación de grasa del mundo, que es más confiable.
- (12) El efecto de congelación solo se dirige a la capa de grasa. Por lo tanto, no provocará congelación en los órganos internos ni dañará la piel.
- (13) Las dos piezas de mano pueden funcionar en un arnés doble, ahorrando tiempo y esfuerzo.

3. Principio


(1) Congelación al vacío

El punto de congelación del agua es de 0 °C, mientras que el de la grasa es de 4 °C. Aprovecha las propiedades de las células grasas para lograr la reducción de la grasa.

La congelación al vacío, a través de la presión negativa, succiona la grasa hacia la pieza de mano de vacío. Congela circularmente cada trozo de grasa. La congelación de la grasa absorberá el calor de la grasa subcutánea lentamente, luego la temperatura de las células grasas se reduce a 0 °C. Es decir, se congelan. La baja temperatura matará las células grasas sin afectar la piel ni los músculos. Luego, las células grasas muertas se descargan a través del hígado, lo que no requiere ninguna fuerza interna. Puede lograr la congelación de la grasa de una sola vez.

Efecto biológico: El agua representa entre el 60% y el 70% del cuerpo humano. El punto de congelación del agua es de 0 °C, mientras que la grasa comienza a congelarse a una temperatura de 4 °C debido a su naturaleza. Podemos decir que la congelación de grasa es exactamente el uso de esta diferencia entre los puntos de congelación para eliminar la grasa. Cuando esté en uso, coloque el dispositivo en las partes que necesiten eliminar la grasa, luego la grasa se solidificará rápidamente en un sólido gelatinoso, lo que provocará citofagia (las células se caen y mueren según el ritmo de crecimiento). El cuerpo considera las células muertas como desechos y las elimina de forma natural en un plazo de 2 a 4 meses. Por lo tanto, este método tiene un efecto instantáneo y podemos sentir que la grasa disminuye en dos semanas o un mes después del tratamiento.

El adelgazamiento corporal con congelación de grasa puede eliminar la grasa y promover la circulación sanguínea y el drenaje linfático para eliminar los desechos dentro del cuerpo. Además, dado que las células grasas muertas se descargan, la cantidad de grasa dentro del cuerpo disminuye, lo que evita el rebote.

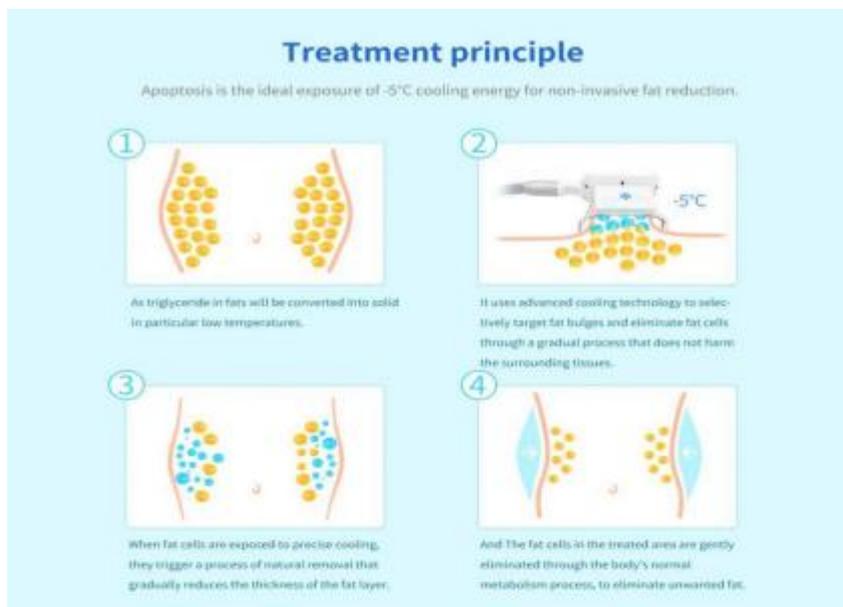

Significant curative effect ❄️

You will be able to create a charming body in 30 minutes of time , after the first treatment ,the effect will probably appear in 4-6 weeks later , and gradually achieve the best result in the next 3 months.



4. Eficacia

- (1) Rompe la grasa dura y espesa y el tejido celular y disuelve las células grasas.
- (2) Reduce el peso local, disuelve la grasa y elimina la obesidad.
- (3) Alivia la flacidez y el envejecimiento de la piel, contrae, da forma y tensa la piel y la hace elástica.
- (4) Disuelve la grasa y crea una curva corporal perfecta.
- (5) Esculpe una cintura A4, piernas esbeltas y glúteos sexys.

5. Indicaciones

- (1) Personas con figura en forma de pera debido a estar mucho tiempo sentadas.
- (2) Personas con brazos flácidos.
- (3) Personas con acumulación extensa de grasa entre la parte externa de las nalgas y los muslos.
- (4) Personas cuya piel comienza a ponerse flácida o flácida.
- (5) Personas obesas debido a comer y beber demasiado.
- (6) Personas con abdomen flácido, barriga prominente, cintura obesa o estrías atróficas después del parto.
- (7) Personas con flacidez en la cintura y el abdomen o cintura en forma de anillo de natación.
- (8) Personas cuyos glúteos muestran una expansión hacia afuera o con exceso de grasa o flacidez.

6. Contraindicaciones

- (1) Aquellos que acaban de tener una cirugía plástica o liposucción o prótesis implantadas u objetos metálicos dentro de las partes tratadas.
- (2) Aquellos que recientemente se inyectaron ácido hialurónico, hicieron un refuerzo de piel o se inyectaron para eliminar arrugas o cirugía plástica.
- (3) Aquellos con hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes, tiroides severa, tumores malignos, etc.
- (4) Aquellos en el período alérgico, con piel severamente sensible o alérgicos a los metales.
- (5) Aquellos con traumatismos o heridas en la piel.
- (6) Aquellos que son mayores de edad.
- (7) Aquellos en menstruación, embarazo, lactancia o recuperación quirúrgica.
- (8) Aquellos con enfermedades de la piel o enfermedades infecciosas.
- (9) Aquellos que tienen una ilusión poco realista sobre el efecto.
- (10) Aquellos que han estado tomando anticoagulantes, dilatadores vasculares o corticosteroides durante mucho tiempo o los están tomando ahora.
- (11) Aquellos con enfermedades del hígado.

7. Asuntos que requieren atención después del tratamiento

- (1) Manténgase abrigado, no coma alimentos fríos y evite exponerse a un ambiente ventoso y resfriarse.
- (2) Dúchese después de 4 a 6 horas.
- (3) Beba más agua tibia para reponer la humedad y acelerar el metabolismo.
- (4) Niéguese a comer y beber demasiado y acostarse hasta tarde.
- (5) Evite comer alimentos crudos, fríos y picantes. Pero duerma lo suficiente.
- (6) Evite usar tops cortos, ropa sin espalda, minifaldas y minishorts.

- (7) Evite rascarse las partes tratadas.
- (8) No frote ni presione las partes tratadas.

Parte II

1. Operaciones detalladas

- Instale todas las piezas en la máquina y coloque las piezas de mano en los racks correspondientes.
- Antes de agregar agua destilada o agua pura, es necesario conectar el embudo a la entrada y abrir la tapa de la salida.
- Vierta agua en la máquina a través del embudo hasta que el agua siga saliendo por la salida y luego retire el embudo y cubra el borde de la salida.



Verifique el equipo y asegúrese de que esté conectado correctamente. Al presionar el interruptor de encendido, aparece la siguiente interfaz inicial.





Configuración y visualización de la hora



Ajuste de hora (disminución)



Ajuste de hora (aumento)



Configuración de temperatura y visualización (se sugiere configurar la temperatura entre $-5\text{ }^{\circ}\text{C}$ y $3\text{ }^{\circ}\text{C}$. Para el usuario primerizo, la temperatura recomendada es $5\text{ }^{\circ}\text{C}$. Puede bajar la temperatura lentamente si se acostumbra).




Ajuste de temperatura (disminuir)




Ajuste de temperatura (aumento)

Observación: Seleccione la pieza de mano correspondiente, enciéndala y luego presione el interruptor principal. Puede encender dos piezas de mano simultáneamente, que funcionan al mismo tiempo.

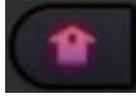

Página principal

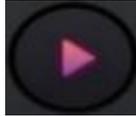

Inicio/Pausa (Este es el interruptor principal. Encienda la pieza de mano correspondiente y luego presione este botón para trabajar).



Devolver



Alerta de temperatura de la pieza de mano. Cuando la temperatura de una pieza de mano es anormal, aparece esta alerta.



Alerta de tanque de agua. Cuando el tanque de agua tiene poca agua o presenta un estado anormal, se emite esta alerta.



Perilla giratoria para ajustar la succión de la pieza de mano de congelación al vacío. Ajústela según la tolerancia del usuario y comience desde la succión más baja y aumentela gradualmente una vez que el cliente se acostumbre.

2. Parámetros técnicos

Voltaje: AC110V/220V 50-60Hz Vacío: 650 mmHg

Flujo de la bomba: 60 l/min

Presión de vacío: 0-100 kPa

Temperatura de congelación: -5°C-0°C, Salida del dispositivo de enfriamiento:

0-5 kPa Líquido de enfriamiento Agua pura

Tiempo de funcionamiento predeterminado: 0-60 min Tamaño del fusible:

F2AL250V

Peso neto: 8,5 kg

Dimensiones: 18" x 14" x 10

3. Contraindicaciones

Las personas que se encuentren en las siguientes situaciones deben utilizar el equipo con precaución. Consulte a un médico o profesional antes de usarlo. Los detalles son los siguientes:

- (1) Mujeres embarazadas o en período de lactancia.
- (2) Personas con enfermedades cardíacas o marcapasos.
- (3) Personas con heridas quirúrgicas sin cicatrizar o en recuperación quirúrgica.
- (4) Personas con epilepsia, diabetes grave o hipertiroidismo.
- (5) Personas con tumores malignos, hemofilia o hemorragia grave.
- (6) Personas con enfermedades de la piel o enfermedades infecciosas deben usarlo con precaución.
- (7) Evite usar joyas de metal durante el tratamiento.
- (8) Está prohibido usar el equipo cerca de partes del cuerpo que tengan implantes de metal, plástico o silicona.
- (9) Personas que hayan estado tomando anticoagulantes, dilatadores vasculares o corticosteroides durante mucho tiempo o los estén tomando actualmente.

4. Precauciones de uso

- (1) Limpie el cabezal de operación con solución salina normal después de su uso y manténgalo en buen estado.
- (2) Se debe utilizar un enchufe con clavija de conexión a tierra y se debe asegurar que la toma de corriente ya esté conectada a tierra antes de utilizar el equipo.
- (3) Asegúrese de que el voltaje del equipo sea adaptable. Si el voltaje de la fuente de alimentación local no es estable, sugerimos que los usuarios agreguen un regulador de voltaje con una potencia coincidente entre la fuente de alimentación de red y el equipo.
- (4) Utilice de manera uniforme las piezas especificadas proporcionadas o sugeridas por el fabricante original para garantizar el efecto curativo del equipo y una vida útil normal.
- (5) No coloque el equipo en un lugar húmedo, cerca de una fuente de agua o en sitios que lo expongan a la luz solar directa.
- (6) No coloque el equipo cerca de una fuente de calor intensa, ya que esto puede afectar su vida útil y el uso diario.
- (7) Retire todos los objetos metálicos del cuerpo antes de usarlo para evitar situaciones inesperadas que puedan afectar el efecto curativo.
- (8) No utilice el equipo en los ojos, la tiroides, la paratiroides, los testículos, el abdomen de una mujer embarazada, en caso de marcapasos, etc.
- (9) Si padece alguna enfermedad, debe utilizarlo con precaución a menos que obtenga el permiso de un médico.
- (10) Apague el interruptor de encendido del equipo si nadie lo utiliza y asegúrese de que la alimentación principal esté apagada después de que todo esté arreglado. De esta manera, se puede mantener la seguridad del equipo.
- (11) Utilice el equipo y capacite a los operadores en estricta conformidad con las instrucciones especificadas en el manual.
- (12) Se recomienda dejar de tomar otros medicamentos para bajar de peso durante 1 o 2 meses antes del tratamiento si los está tomando actualmente. El tratamiento se debe extender si desea tomarlo inmediatamente.
- (13) No utilice el equipo con el estómago vacío y espere al menos una hora después de una comida completa antes de comenzar el tratamiento para bajar de peso.
- (14) El equipo debe estar en contacto completo con la piel para evitar una temperatura desigual durante su uso.

(15) La película de congelación correspondiente debe aplicarse a la parte tratada para evitar que la piel se seque o que el dispositivo entre en contacto directo con el tratamiento.

(16) Después de la operación, limpie el equipo con solución salina normal para garantizar su limpieza e higiene y prolongar su vida útil.

5. Problemas comunes y soluciones

(1) ¿No se puede encender el equipo y los botones de la parte posterior no se encienden?

A. Asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado a una toma de corriente en buen estado.

B. Compruebe si el tubo fusible de la parte posterior está suelto o quemado.

(2) ¿La máquina deja de funcionar después de encenderla?

A. Quizás el flujo de agua no es lo suficientemente fuerte, lo que dificulta su detección.

B. Compruebe si falta agua en el tanque de agua.

(3) ¿Hay una alerta roja en el icono de la gota de agua en la esquina superior derecha?

A. Compruebe si hay suficiente agua.

B. Compruebe si el tanque de agua está dañado o no.

(4) ¿Se puede encender el equipo, pero hay un mensaje de error en el monitor?

A. Retire el enchufe de la parte posterior, espere aproximadamente 1 minuto, vuelva a enchufarlo y reinicie el equipo.

B. Si las soluciones mencionadas anteriormente no funcionan, comuníquese con el distribuidor del equipo para obtener ayuda.

6. Preguntas frecuentes

(1) P: ¿La congelación de grasa tiene efectos secundarios?

R: La congelación de grasa es un método completamente no invasivo e indoloro para la reducción de grasa. Utiliza el principio de que las células grasas no son resistentes al frío en comparación con otras células, lo que hace que las células grasas mueran antes debido a la baja temperatura. La congelación a baja temperatura

constante solo puede actuar sobre las células grasas, no ejerce ninguna influencia sobre otros tejidos y no causa daño a la piel o los músculos. Y las células grasas muertas se descargarán durante el metabolismo corporal. Por lo tanto, no tiene efectos secundarios.

(2) P: ¿Cómo se logra adelgazar el cuerpo mediante la congelación de grasa?

R: La congelación de grasa es un procedimiento en el que el dispositivo se coloca sobre la superficie de la piel, lo que hace que la temperatura del tejido subcutáneo alcance los 5, lo que provoca un envejecimiento más temprano y la muerte de las células grasas. Y las células grasas muertas se descargarán durante el metabolismo corporal, logrando así el efecto de adelgazamiento corporal.

(3) P: ¿Tengo que hacer dieta y ejercicio después del tratamiento?

R: Después del tratamiento, todavía necesitamos hacer ejercicio y controlar la dieta. La congelación de grasa solo disminuye la grasa dentro del cuerpo y no aumenta esencialmente las calorías esenciales del metabolismo. Por lo tanto, puede tener un efecto de rebote si no hacemos ejercicio y controlamos lo que comemos.

(4) P: ¿Cuánto tiempo se tarda en ver el efecto de la congelación de grasa?

R: Se tarda aproximadamente de 1 a 2 meses y está relacionado con el físico y el metabolismo de cada persona. La congelación de grasa utiliza el principio de que las células grasas no son resistentes al frío. Congela las células grasas hasta la muerte a una temperatura baja constante de 5 °C y luego descarga las células muertas a través del metabolismo corporal. Por lo tanto, se necesita un tiempo para ver el efecto.

(5) P: ¿Por qué tenemos que usar el dispositivo con la membrana anticongelante adecuada?

A: El ingrediente principal de una membrana anticongelante son moléculas genéticas creadas según el principio de expansión con el calor y contracción con el frío y dentro del rango de tolerancia de la piel. La prueba clínica muestra que puede prevenir eficazmente la congelación de la piel causada por equipos de disolución de grasa congelados y trajes para prevenir la congelación causada por todo tipo de equipos similares.

7. Lista de embalaje

1xMáquina principal

2xMango de enfriamiento del cuerpo 1xEmbudo de agua

1xCable de alimentación

2xFusible 2xFiltro

8. Diagramas operativos

Parámetro Configuración	Coincident Producto	Técnica	Diagrama
Modelado de cintura y abdomen: 30 minutos/una vez al mes			
Temperatura de congelación al vacío: -5 °C a 3 °C	Toalla + Membrana Anticongelante +	1. Limpie la cintura y el abdomen con una toalla. 2. Elija la membrana anticongelante adecuada	N/A Precaución: Durante la operación,

<p>Tiempo: 10 a 30 minutos Succión: se puede modificar según la tolerancia del cliente y se recomienda comenzar desde el nivel más bajo para evitar molestias.</p>	<p>Anticongelant Congelación al Vacío</p>	<p>según el tamaño de la parte grasa y luego aplíquela uniformemente sobre la parte tratada. 3. Establezca la temperatura, el tiempo y la succión para la pieza de mano correspondiente. 4. Coloque la pieza de mano en la parte grasa del abdomen con una membrana anticongelante cubriéndola, ajuste la succión según la tolerancia del cliente y luego déjela allí durante aproximadamente 10 a 30 minutos. 5. Retire el dispositivo y la membrana anticongelante y limpie la parte tratada. 6. Haga lo mismo en el otro lado. 7. El tratamiento finaliza.</p>	<p>la grasa de la cintura y el abdomen se absorberá lentamente. Cuanto mayor sea el nivel de succión, más apretada se sentirá la parte grasa. Las dos piezas de mano pueden funcionar en un arnés doble. Al colocar la pieza de mano en la parte grasa, salen burbujas porque hay algo de aire dentro de la membrana anticongelante, que tiene succión. Las partes tratadas pueden presentar una ligera hinchazón y enrojecimiento, lo cual es un fenómeno normal. No se preocupe por ello.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El curso de tratamiento recomendado:
 El tratamiento consta de cuatro sesiones. Después de una sesión, la hinchazón y el entumecimiento desaparecerán en aproximadamente una semana, y la grasa disminuirá poco a poco en la segunda semana, y se podrá ver un efecto evidente en aproximadamente dos meses. En promedio, la grasa se reducirá en un 22%, pero varía de persona a persona. Después de una sesión, el tamaño será menos claro, el abdomen y la cintura se volverán delgados, la barriga comenzará a desaparecer y la piel se volverá firme. Para consolidar el efecto, se recomienda realizar el tratamiento cada dos meses en una etapa posterior.

Escultura de espalda: 30 minutos/una vez al mes

<p>Temperatura de congelación al vacío: -5 a 3 Tiempo: 10 a 30 minutos</p>	<p>Toalla + Membrana Anticongelante + Vacío Congelación</p>	<p>1. Limpie la espalda con una toalla. 2. Elija la membrana anticongelante adecuada según el tamaño de la parte grasa y luego aplíquela uniformemente sobre la parte tratada.</p>	<p>N/A Precaución: La espalda experimentará una evidente sensación de tirantez y la grasa se absorberá lentamente.</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Succión: Se puede modificar según la tolerancia del cliente, y se aconseja empezar desde el nivel más bajo cuando se acaba de operar para evitar molestias.</p>		<p>3. Establezca la temperatura, el tiempo y la succión para la pieza de mano correspondiente. 4. Coloque la pieza de mano en la parte grasa que se va a tratar y cambie la succión según la tolerancia del cliente. Luego, déjela allí durante aproximadamente 10 a 30 minutos. 5. Retire el dispositivo y la membrana anticongelante y limpie la parte tratada.</p>	<p>Las partes tratadas pueden presentar una ligera hinchazón y enrojecimiento, lo cual es un fenómeno normal. No se preocupe por ello.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El curso de tratamiento recomendado:

El tratamiento consta de varias sesiones. Después de una sesión, la hinchazón y el entumecimiento desaparecen en aproximadamente dos semanas, disminuyendo gradualmente en la segunda semana y el efecto es evidente en aproximadamente dos meses. En promedio, la grasa se reduce en un 22%, pero esto varía de persona a persona. Después de una sesión, el tamaño se vuelve menos evidente, la espalda se vuelve más delgada y la grasa excesiva desaparece. Para consolidar el efecto, es necesario realizar el tratamiento cada dos meses en una etapa posterior.

Esculpir glúteos: 30 minutos/una vez al mes

<p>Temperatura de congelación al vacío: -5 a 3 Tiempo: 10 a 30 minutos Succión: se puede modificar según la tolerancia del cliente y se recomienda comenzar desde el nivel más bajo para evitar molestias.</p>	<p>Toalla + Membrana anticongelante + Vacío Congelación</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Limpie las nalgas con una toalla. 2. Elija la membrana anticongelante adecuada según el tamaño de la parte grasa y luego aplíquela uniformemente sobre la parte tratada. 3. Establezca la temperatura, el tiempo y la succión para la pieza de mano correspondiente. 4. Coloque la pieza de mano en la parte grasa que se va a tratar y cambie la succión según la tolerancia del cliente, luego déjela allí durante aproximadamente 10 a 30 minutos. 5. Retire el dispositivo y la membrana anticongelante y limpie la parte tratada. 	<p>N/A Precaución: La grasa de los glúteos se contraerá de forma evidente. Las partes tratadas pueden presentar una ligera hinchazón y enrojecimiento, lo cual es un fenómeno normal. No se preocupe por ello.</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		6. Realizar lo mismo en el otro lado. 7. Finaliza el tratamiento.	
--	--	----------------------------------------------------------------------	--

El curso de tratamiento recomendado:
El tratamiento consta de cuatro sesiones. Después de una sesión, la hinchazón y el entumecimiento desaparecerán en aproximadamente una semana, y la grasa disminuirá poco a poco en la segunda semana, y se podrá ver un efecto evidente en aproximadamente dos meses. En promedio, la grasa se reducirá en un 22%, pero varía de persona a persona. Después de una sesión, el tamaño será menos evidente, el exceso de grasa y flacidez de los glúteos desaparecerá y la piel de los glúteos se tensará. Para consolidar el efecto, es mejor realizar el tratamiento cada dos meses en una etapa posterior.

Escultura de piernas: 30 minutos/una vez al mes

Temperatura de vacío Congelación: -5 a 3 Tiempo: 10 a 30 minutos Succión: se puede modificar según la tolerancia del cliente y se recomienda comenzar desde el nivel más bajo para evitar molestias.	Toalla + Membrana anticongelante + Vacío Congelación	1. Limpie las piernas con una toalla. 2. Elija la membrana anticongelante adecuada según el tamaño de la parte grasa y luego aplíquela uniformemente sobre la parte tratada. 3. Establezca la temperatura, el tiempo y la succión para la pieza de mano correspondiente. 4. Coloque la pieza de mano en la parte grasa de toda la pierna con una cubierta anticongelante y cambie la succión según la tolerancia del cliente. Luego déjela allí durante aproximadamente 10 a 30 minutos. 5. Retire el dispositivo y la membrana anticongelante y limpie la parte tratada. 6. Haga lo mismo en el otro lado. 7. El tratamiento termina.	N/A Precaución: La grasa de la pierna estará evidentemente contraída. Las partes tratadas pueden presentar una ligera hinchazón y enrojecimiento, lo cual es un fenómeno normal . No se preocupe por ello.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El curso de tratamiento recomendado:

Un tratamiento consta de cuatro sesiones. Después de una sesión, la hinchazón y el entumecimiento desaparecerán en aproximadamente una semana, y la grasa disminuirá poco a poco en la segunda semana, y se podrá ver un efecto evidente en aproximadamente dos meses. En promedio, la grasa se reducirá en un 22%, pero varía de persona a persona. Después de una sesión, el tamaño se vuelve menos evidente, las piernas se adelgazan, la forma de las piernas ya está clara, la flacidez de las piernas desaparece, la piel se reafirma y las piernas delgadas se desarrollan. Para realizar el tratamiento cada dos meses en una etapa posterior para consolidar el efecto.